

GIBAUD


Orthopädie



GESAMTKATALOG SCHWEIZ 2026 - 2027




GELENKE UND RÜCKEN MASS NEHMEN

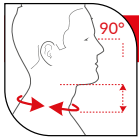


A Cervicalstütze

- Umfang am Halsansatz
- Höhe Brustbeingabel - Kinn- Unterseite Blick geradeaus

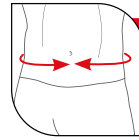


B Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen

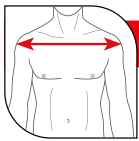


C Abstand Schulter zu Schulter

Den Abstand von Schulter zu Schulter (auf dem Rücken) messen

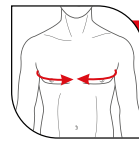


D Brustumfang

Den Brustumfang auf der Brust (ohne Arme) messen

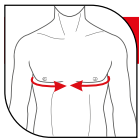


E Umfang des Thorax

- Mann: Den Umfang des Brustkorbs über den Brustwarzen (ohne Arme) messen
- Frau: Den Umfang des Brustkorbs unterhalb der Brust (ohne Arme) messen

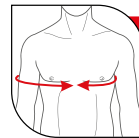


F Umfang des Thorax + Humerus

Den Umfang des Thorax unter der Brust + Oberarm (nur ein Arm) messen

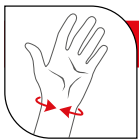


G Umfang des Handgelenks

Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen

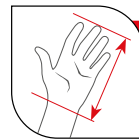


H Länge der Hand

Die Länge zwischen dem Handgelenk und der Spitze des verlängerten Fingers messen

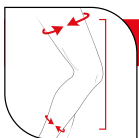


I Länge Oberschenkel / Wade

Die Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade messen

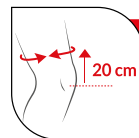


J Umfang des Schenkels

Den Schenkelumfang 20 cm oberhalb der Mitte der Kniescheibe messen

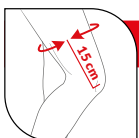


K Schenkelumfang

Den Schenkelumfang 15cm oberhalb der Mitte der Kniescheibe messen

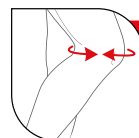


L Knieumfang

Knieumfang bei leichter Flexion in der Mitte der Kniescheibe

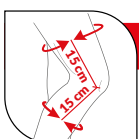


M Umfang von Schenkel & Wade

- Messen:
- Umfang 15 cm oberhalb der Mitte der Kniescheibe
 - Umfang 15 cm unterhalb der Mitte der Kniescheibe

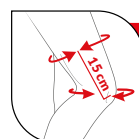


N Umfang Knie und Oberschenkel

- Messen:
- Knieumfang
 - Umfang 15 cm oberhalb des Knies

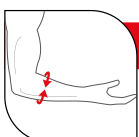

O Umfang des Unterarms


Den Umfang des Unterarms unterhalb des Ellbogens messen

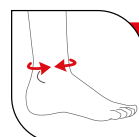

P Knöchelumfang

Den Umfang oberhalb des Knöchels messen

INHALTSÜBERSICHT

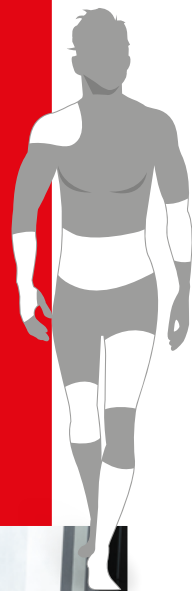

INNOTHERA GRUPPE

UNSERE DNA

Seit mehr als einem Jahrhundert setzt sich **INNOTHERA**, ein unabhängiges, familiengeführtes französisches Unternehmen, täglich dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit alltäglichen Erkrankungen zu verbessern.

Unsere Unabhängigkeit und unsere Werte leiten jede Phase unserer Entwicklung: Ein pragmatischer und zugleich stringenter Ansatz, getragen von einem kontinuierlichen Streben nach Qualität, Innovation und wissenschaftlicher Exzellenz.

Unsere Stärke liegt in unseren Mitarbeitenden: Ihr Engagement und ihre Fachkompetenz sind die treibenden Kräfte unseres Erfolgs. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, die auf Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein und der konsequenten Wahrung unserer Werte beruht – fest verankert in unseren regionalen Strukturen.

UNSERE THERAPIEBEREICHE



INNOTHERA engagiert sich für die Verbesserung der Versorgung bei alltäglichen Gesundheitsproblemen in mehreren wesentlichen therapeutischen Bereichen:

- **Erhalt der Beweglichkeit:** Als Experte für medizinische Kompressionsversorgung, Orthopädie und Podologie bieten wir Lösungen zur Erhaltung der Mobilität und zur Linderung von Beschwerden in Zusammenhang mit venöser Insuffizienz. Unsere Medizinprodukte sind darauf ausgelegt, Wirksamkeit, Tragekomfort und Ästhetik miteinander zu vereinen und den Bedürfnissen aller Patientinnen und Patienten gerecht zu werden.

- **Frauengesundheit:** Wir bieten Therapien, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind, insbesondere in der Gynäkologie, in der Prävention von Anämie, in der Versorgung bei Osteoporose sowie alternative kontrazeptive Lösungen.

- **Saisonale Erkrankungen:** Wir stellen angepasste Lösungen für die Behandlung häufiger Beschwerden zur Verfügung, insbesondere zur Therapie von respiratorischen und intestinalen Infektionen.

- **Hygiene und tägliche Pflege:** Unsere Innovationen im Bereich Hygiene richten sich sowohl an den stationären Bereich als auch an die häusliche Pflege. Sie tragen zur Verbesserung von Sicherheit, Würde und Komfort der Patientinnen und Patienten bei und reduzieren gleichzeitig das Infektionsrisiko.

INNOTHERA bietet konkrete und bedarfsgerechte Lösungen für die täglichen Gesundheitsbedürfnisse von Millionen von Menschen.

Geschätzte Geschäftspartnerinnen und -partner,

Seit 112 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt das unabhängige französische Unternehmen **INNOTHERA** Arzneimittel, Medizinprodukte und Hygieneartikel mit einer klaren Mission: die Behandlung alltäglicher Erkrankungen weltweit schrittweise und kontinuierlich zu verbessern.

In diesem Sinne ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen **INNOTHERA** und **GIBAUD®**, Ihnen in diesem Katalog ein Angebot an orthopädischen Medizinprodukten zu präsentieren, das speziell auf den Schweizer Markt zugeschnitten ist.

Mit dem neuen Katalog GIBAUD SCHWEIZ 2026-2027 haben wir das Privileg, Ihnen unseren neuen GIBAUD-Vertriebspartner in der Schweiz und in Liechtenstein vorzustellen:

Wir freuen uns sehr, mit der Firma **F. UHLMANN-EYRAUD SA** in Lenzburg einen renommierten Schweizer Partner gewonnen zu haben, der wie GIBAUD und INNOTHERA in Frankreich ein Familienunternehmen mit einer hundertjährigen Geschichte im Gesundheits- und Pharmabereich ist. Mit einem etablierten Vertriebsteam, mit dem Sie bereits in Kontakt stehen, freuen wir uns auf eine erhöhte Präsenz und neue Entwicklungsperspektiven für die Marke GIBAUD in der Schweiz.

Ich möchte Ihnen daher für unsere derzeitige und zukünftige Zusammenarbeit danken, und für dieses gemeinsame Engagement, das wir mit Leidenschaft teilen: das Streben nach einer besseren Gesundheit für alle.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Arnaud Gobet



Arnaud Gobet

Präsident
Generaldirektor
der INNOTHERA
Gruppe

PRODUKTSUPPORT **GIBAUD**

ERWEITERN SIE IHR
WISSEN...

BERATUNG **VOR ORT BEI IHNEN**

Schulungen in Ihrer Apotheke durch Ihre (n) Vertreter (in)*,

angepasst an **Ihre Bedürfnisse und Ihre Entwicklungsziele**

(* gemäss Partnerschafts-Bedingungen oder Sichtwahlofferte)

Kontaktieren
Sie Ihre Ansprech-
person

VERSCHIEDENE THEMEN

- Zusatzverkauf
- Verstauchung
- Unterstützung bei der Abgabe
- Wiederaufnahme der körperlichen Aktivität
- Schwangerschaft und Mutterschaft
- Lendenwirbelsäulenschmerzen



Mobilisieren Sie Ihr Team, betreiben Sie **Patientenbindung**

ORTHOPÄDIE BERATUNG IN DER APOTHEKE

BAUEN SIE **EXPERTISE AUF**

ORTHO
phar
FORTBILDUNGSSEMINARE

**FPH AKKREDITIERTE
FORTBILDUNG**



Weitere Auskünfte und
Anmeldeformular



Seit 2018 ist Orthophar

Ihr Partner in der Schweiz für
spezialisierte Weiterbildungen im Bereich
der Orthopädie in der Apotheke.

2 MODULE

- **Modul 1** : Kernkompetenzen und Abgabepaxis
- **Modul 2** : Ergänzende Kenntnisse und Praxis-Workshop

1 Tag = 50 FPH-Punkte



und **fördern Sie** Ihre Bekanntheit!

INTERNETSEITE **GIBAUD**




www.gibaud.ch



- Unsere Mission
- Unser Fachwissen
- Unsere Produkte
- Über uns
- Der Onlinekatalog
- Die Fortbildungen (FPH)

ORTHO
FORTBILDUNGSEMINARE

Hier erhalten Sie
weitere Informationen

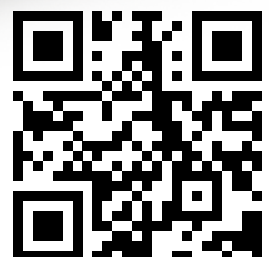



HALS

CERVICALSTÜTZEN C1 WEICH S.9

ENTSCHEIDUNGSBAUM

HALS

WELCHE SITUATION?

AKUT - DRINGEND

CHRONISCH -
PRÄVENTIV

MITTELSCHWERE BEWE-
GUNGSEINSCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)



CERVICALSTÜTZEN
C2

LEICHTE BEWE-
GUNGSEINSCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)



CERVICALSTÜTZEN
C1

MITTELSCHWERE BEWE-
GUNGSEINSCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)



CERVICALSTÜTZEN
C2

LEICHTE BEWE-
GUNGSEINSCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)



CERVICALSTÜTZEN
C1

Extensionstrauma des Halses

Arthrose der Halswirbelsäule
Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule

CERVICALSTÜTZEN C1 WEICH - MIT SCHUTZÜBERZUG

STÜTZUNG



Cervicalstütze

- Umfang am Halsansatz
- Höhe Brustbeingabel - Kinn-Unterseite Blick geradeaus.

INDIKATIONEN

Leichte Beschwerden am Hals oder Pathologien, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Ruhigstellung der Halswirbelsäule indiziert ist:

- Extensionstrauma des Halses (Verstauchung der Halswirbelsäule)
- Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule
- Arthrose der Halswirbelsäule

Art.-Nr. UHLMANN	Art.-Nr. GIBAUD	Farbe	Grösse	Umfang am Halsansatz in cm	Höhe	GTIN	PHARMACODE
18493	6625	Grau	0 JUNIOR	28 - 34	6 cm	3322541024152	6270887
18496			1	29 - 34	7,5 cm	3322541024169	6270893
18497	6626		2	35 - 40		3322541024176	6270901
18495			3	41 - 46		3322541024183	6270918
18494			4	47 - 52	3322541024190	6270924	
18499			1	29 - 34	8,5 cm	3322541024206	6270930
18501	6627		2	35 - 40		3322541024213	6270947
18500			3	41 - 46		3322541024220	6270953
18498			4	47 - 52	3322541024237	6270976	
18504			1	29 - 34	9,5 cm	3322541024244	6270982
18505	6628		2	35 - 40		3322541024251	6270999
18503			3	41 - 46		3322541024268	6271007
18502			4	47 - 52	3322541024275	6271013	

MiGel: 22.12.01.00.1

CERVICALSTÜTZEN C2 VERSTÄRKT - MIT ABNEHMBARER VERSTEIFUNG

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG



Cervicalstütze

- Umfang am Halsansatz
- Höhe Brustbeingabel - Kinn-Unterseite Blick geradeaus.

INDIKATIONEN

Leichte Beschwerden am Hals oder Pathologien, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Ruhigstellung der Halswirbelsäule indiziert ist:

- Extensionstrauma des Halses (Verstauchung der Halswirbelsäule)
- Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule
- Arthrose der Halswirbelsäule

DIE VORTEILE

- Abnehmbarer Schutzüberzug
- Schränkt den Bewegungsradius der Halswirbelsäule ein
- Abnehmbare Verstärkung aus Polypropylen

Art.-Nr. UHLMANN	Art.-Nr. GIBAUD	Farbe	Grösse	Umfang am Halsansatz in cm	Höhe	GTIN	PHARMACODE
18508	6636	Grau	1	29 - 34	7,5 cm	3322541024534	6271036
18509			2	35 - 40		3322541024541	6271042
18507			3	41 - 46		3322541024558	6271059
18506			4	47 - 52	3322541024565	6271065	
18511	6637		1	29 - 34	8,5 cm	3322541024572	6271071
18513			2	35 - 40		3322541024589	6271088
18512			3	41 - 46		3322541024596	6271094
18510			4	47 - 52	3322541024602	6271102	

MiGel: 22.12.02.00.1

NOTIZEN



SCHULTER

ARM-SCHULTER-BANDAGE EINHEITSGRÖSSE S.12

ENTSCHEIDUNGSBAUM

SCHULTER

WELCHE SITUATION?

AKUT - DRINGEND

CHRONISCH -
PRÄVENTIV

RELATIVE
RUHIGSTELLUNG



S.12

**ARM-SCHULTER
BANDAGE EINHEITSGRÖSSE**

STÜTZUNG



S.13

**ARMSCHLINGE
MIT TASCHE**

STÜTZUNG



S.13

ARMSCHLINGE

Abheilen

Verletzungen von weichem
Gewebe

Instabilität
Schultertrauma

Nach einem Trauma

Vor/nach einem chirurgischen
Eingriff

Stützung eines Gipsverbandes
oder einer Orthese

Nach einem Trauma

Vor/nach einem chirurgischen
Eingriff

Stützung eines Gipsverbandes
oder einer Orthese

ARM-SCHULTER-BANDAGE EINHEITSGRÖSSE

RUHIGSTELLUNG



6 Umfang des Thorax+ Humerus

Den Umfang des Thorax unter der Brust + Oberarm (nur ein Arm) messen

INDIKATIONEN

Beschwerden mit der Schulter, bei denen eine Ruhigstellung des Schulterblattbereichs mit dem seitlich am Körper anliegenden Ellbogen insbesondere in den folgenden Fällen indiziert ist:

- Vor oder nach einem Eingriff
- Abheilen/Verletzungen von weichem Gewebe
- Instabilitäten/Verletzungen der Schulter

VORTEIL

Klettverschlüsse

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Einheitsgrösse (Umfang des Thorax unterhalb der Brust + Oberarm max. 130 cm)	GTIN	PHARMACODE
18469	6452	Schwarz	1	3322547811329	2637003

MiGeL: 22.09.01.00.1

ARM-SCHULTER-BANDAGE

RUHIGSTELLUNG



6 Umfang des Thorax+ Humerus

Den Umfang des Thorax unter der Brust + Oberarm (nur ein Arm) messen.

* Wenn beim Messen das Ergebnis nahe an der nächsten Grösse liegt, empfehlen wir Ihnen die nächstgrössere Grösse zu wählen

INDIKATIONEN

Beschwerden mit der Schulter, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Ruhigstellung des Schulterblattbereichs mit seitlich am Körper anliegendem Ellbogen indiziert ist:

- Instabilitäten/Verletzungen der Schulter
- Vor oder nach einem operativen Eingriff
- Abheilen/Überdehnung von weichem Gewebe

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Grösse* Umfang des Thorax unterhalb der Brust + Oberarm in cm	GTIN	PHARMACODE
18424		Schwarz	0	JUNIOR < 45	3322541008060	4791406
18423			1	JUNIOR 45 - 55	3322541008077	4791398
18422	4209		2	55 - 75	3322541008084	4791381
18421			3	75 - 95	3322541008091	4791375
18420			4	95 - 115	3322541008107	4791369
18425			5	115 - 135	3322541008114	4791412

MiGeL: 22.09.01.00.1

NOTIZEN

ARMSCHLINGE MIT TASCHЕ

STÜTZUNG



Umfang des Thorax

- Mann: Den Umfang des Brustkorbs über den Brustwarzen (ohne Arme) messen
- Frau: Den Umfang des Brustkorbs unterhalb der Brust (ohne Arme) messen

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen eine Unterstützung des Arms insbesondere in den folgenden Fällen indiziert ist:

- Nach einer Verletzung sowie vor oder nach einem chirurgischen Eingriff
- Unterstützung eines Gipsverbands oder einer Schiene

DIE VORTEILE

- Verstellung durch Schiebescnalle
- Stützt den Arm

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
18476			1	60 - 80	3322546048078	5922460
18477	6507	Schwarz	2	80 - 100	3322546048146	5922448
18475			3	100 - 120	3322546048221	5922431
18474			4	120 - 140	3322541008428	5922483

MiGel: 05.10.03.00.1

ARMSCHLINGE

STÜTZUNG



INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen eine Unterstützung des Arms insbesondere in den folgenden Fällen indiziert ist:

- Nach einer Verletzung sowie vor oder nach einem chirurgischen Eingriff
- Unterstützung eines Gipsverbands oder einer Schiene

VORTEIL

- Stützt den Arm
- Einstellbar

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Einheitsgrösse	GTIN	PHARMACODE
18492	6612	Schwarz	1	3322541022868	6041543

MiGel: 05.10.02.00.1

NOTIZEN



RÜCKEN

LOMBOGIB® Db S.18

GIBAUD

ENTSCHEIDUNGSBAUM RÜCKEN

WELCHE SITUATION?

CHRONISCH - PRÄVENTION (ODER IN AKUTPHASEN)

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG
(LENDENWIRBELSTÜTZE)



S.16

**LOMBOGIB®
FINESSE**

Bei langem Stehen oder Sitzen,
direkt auf der Haut zu tragen



S.20

**LOMBOGIB®
PROGRESSIV**

Als **Einfachstützgurt**:
Bei längerem Stehen oder Sitzen
Als **Doppelstützgurt**:
Bei Tätigkeiten, die eine stärkere
Stützung erfordern

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG
(LENDENWIRBELSTÜTZE)



S.17

**LOMBOGIB®
DOUBLE ACTION**

Schwere Arbeiten,
starke
Beanspruchung

STÜTZUNG
(ILIOSAKRALGELENK
UND OBERHALB DES
SCHAMBEINS)



S.18

**LOMBOGIB®
Bb**

Schwangere

KORREKTUR DER
HALTUNG
(STÜTZUNG)



S.19

NIERENWÄRMER

**Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich
(Lumbago)**

Ischias

Verletzungen der LWS

Chronische Schmerzen im unteren Rücken

**Rückenschmerzen im
Lendenwirbelbereich
(Lumbago)**

Ischias

Verletzungen im
LWS-Bereich

Chronische Schmerzen im
unteren Rücken

**Schwangerschafts-
bedingte
Schmerzen
im unteren Rücken**

**Schmerzen im
unteren Rücken**

DIE KÖRPERHALTUNG UNTERSTÜTZEN

BEI LANGEM SITZEN ODER STEHEN
& HYPERLORDOSIERTE PATIENTEN

GIBAUD LINDERT SCHMERZEN

Entdecken Sie den Gurt, der Rückenschmerzen lindert und Sie bequem durch den Alltag begleitet.



DAS ANLEGEN IM VIDEO



LOMBOGIB® FINESSE

PATENTIERT

LEICHTES
GEWEBE

PATENTIERTE
V-FÖRMIG
ANGEORDNETE
STREBEN



STÜTZUNG



Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen

INDIKATIONEN

Beschwerden der Lendenwirbelsäule, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung indiziert ist:

- Muskelschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago)
- Ischias
- Lumbosakrale Läsionen
- Chronische Schmerzen im Lendenwirbelbereich

DIE VORTEILE

- Patentiertes einlagiges Aeralis®- Gewebe, sehr weich und atmungsaktiv
- Patentierte, ergonomisch geformte Fingerschlaufen
- Kann auf oder unter der Kleidung getragen werden

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	18571	6748	Blau	0	66 - 80	3322541073600	1098542
	18573			1	80 - 90	3322541073617	1098543
	18575			2	90 - 100	3322541073624	1098545
	18574			3	100 - 110	3322541073631	1098546
	18576			4	110 - 125	3322541073648	1098547
	18572			5	125 - 140	3322541073655	1098548
MiGel: 22.14.02.00.1							

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
21 cm	18578	6749	Blau	0	66 - 80	3322541073662	1098549
	18580			1	80 - 90	3322541073679	1098551
	18581			2	90 - 100	3322541073686	1098552
	18582			3	100 - 110	3322541073693	1098553
	18579			4	110 - 125	3322541073709	1098554
	18577			5	125 - 140	3322541073716	1098555
MiGel: 22.14.02.00.1							

REDUKTION DER BELASTUNG

DER LENDENWIRBEL BEI BEUGE- UND STRECKBEWEGUNGEN

Entdecken Sie den Lendengurt, der Ihren
Bewegungen Halt gibt



DAS ANLEGEN IM
VIDEO



LOMOGIB® DOUBLE ACTION

PATENTIERT

PATENTIERTE
FINGERSCHLAUFEN

PATENTIERTE
V-FÖRMIG
ANGEGORDNETE
STREBEN

DOPPELZUG



STÜTZUNG



Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen

INDIKATIONEN

Beschwerden der Lendenwirbelsäule, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung in Frage kommt:

- Muskelschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago)
- Ischias
- Lumbosakrale Läsionen
- Chronische Schmerzen im Lendenwirbelbereich

DIE VORTEILE

- Patentierte hohe, gepolsterte Rückenstütze
- Rückenstütze abnehmbar bei Patienten mit geringer Lordose
- Doppelzug: breite doppelte Gurtbänder zur Anpassung der Spannung entsprechend der Aktivität und dem Schmerz
- Patentierte ergonomische Fingerschlaufen

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	18521	6658	Blau	0	70 - 80	3322541035363	6665829
	18522			1	80 - 90	3322541035370	6665835
	18524			2	90 - 100	3322541035387	6665841
	18525			3	100 - 110	3322541035394	6665858
	18523			4	110 - 125	3322541035400	6665864
	18520			5	125 - 140	3322541035417	6665870

MiGel: 22.14.02.00.1

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
21 cm	18526	6667	Blau	0	70 - 80	3322541038029	7000368
	18528			1	80 - 90	3322541038036	7000374
	18530			2	90 - 100	3322541038043	7000380
	18531			3	100 - 110	3322541038050	7000397
	18529			4	110 - 125	3322541038067	7000405
	18527			5	125 - 140	3322541038074	7000411

MiGel: 22.14.02.00.1

REDUZIERT RÜCKENSCHMERZEN WAHREND DER SCHWANGERSCHAFT



Entdecken Sie den leichten, anpassbaren Gurt zur Unterstützung Ihres Rückens bei schwangerschaftsbedingten Lumbalgien während der gesamten Schwangerschaft.

DAS ANLEGEN IM VIDEO



ANPASSBAR AN DIE ENTWICKLUNG DER SCHWANGERSCHAFT

LOMBOGIB® Bb

PATENTIERT



UNTERSTÜTZUNG DES RÜCKENS SCHWANGERER FRAUEN



INDIKATIONEN

Zur Stützung des Iliosakralgelenks und oberhalb des Schambeins vor allem in den folgenden Fällen:

- Schwangerschaftsbedingte Schmerzen im Lendenwirbelbereich

DIE VORTEILE

- Stützt bei schwangerschaftsbedingten Schmerzen im Lendenwirbelbereich
- Spezielle Bänder gegen Beckenanteversion (Hyperlordose)
- 2 Streifen, mit dehnbarer Seitenpartie, an Schwangerschaftsverlauf anpassbar, stützen den Bauch, ohne einzuengen



Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	18583	6750	Blau	1	80 - 140	3322541073723	1127064

MiGeL: 22.14.02.00.1

DER CHALEUR NIERENWÄRMER IST EIN NIGHTINVASIVES, NATÜRLICHES UND NACHHALTIGES MEDIZINPRODUKT



NIERENWÄRMER CHALEUR

HÄLT DIE WÄRME



INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, für die eine Unterstützung durch die wärmehaltenden Eigenschaften der Wolle in Frage kommt, namentlich in folgendem Fall:

- Schmerzen im unteren Rückenbereich

DIE VORTEILE

- Wolle, die die Körperwärme auf natürliche Weise hält
- Natürliche Modal®-Faser macht das Gewebe noch weicher und luftdurchlässig

Weich, luftdurchlässig und bequem.



Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen



HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ÉTIENNE

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
25 cm	18427	4292	Anthrazit	S	61 - 75	3322541067326	7809767
	18429			M	75 - 90	3322541067333	7809768
	18428			L	90 - 105	3322541067340	7809769
	18426			XL	105 - 120	3322541067357	7809770
30 cm	18435	4297	Anthrazit	M	75 - 90	3322541067524	7809775
	18437			L	90 - 105	3322541067531	7809776
	18434			XL	105 - 120	3322541067548	7809777
	18436			XXL	120 - 135	3322541067555	7809778
25 cm	18432	4293	Ecrü	S	61 - 75	3322541067364	7809771
	18433			M	75 - 90	3322541067371	7809772
	18431			L	90 - 105	3322541067388	7809773
	18430			XL	105 - 120	3322541067395	7809774

LOMBOGIB® PROGRESSIV



ALS EINFACHSTÜTZGURT: BEI LÄNGEREM STEHEN ODER SITZEN
ALS DOPPELSTÜTZGURT: BEI TÄTIGKEITEN, DIE EINE STÄRKERE STÜTZUNG ERFORDERN



Verstellbare
Doppelstützgurt
mit
Sicherheitsverschluss.

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden im Lendenwirbelbereich, für die eine Ruhigstellung in Frage kommt, insbesondere in folgenden Fällen:

- Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago)
- Ischias
- Verletzungen an der LWS
- Chronische Schmerzen im unteren Rücken

DIE VORTEILE

- Patentierte V-förmig angeordnete Stäbe
- Weicher, durchbrochener Stoff
- Höhenverstellbarer, abnehmbarer Doppelstützgurt zur Anpassung an die jeweilige Tätigkeit
- Doppelstützgurt mit Sicherheitsverschluss



Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
21 cm	18566	6745	Blau	0	66 - 80	3322541073426	1098562
	18567			1	80 - 90	3322541073433	1098563
	18569			2	90 - 100	3322541073440	1098564
	18570			3	100 - 110	3322541073457	1098565
	18568			4	110 - 125	3322541073464	1098566
	18565		5	125 - 140	3322541073471	1098567	
MiGel: 22.14.01.00.1							

DAS ANLEGEN IM VIDEO



NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

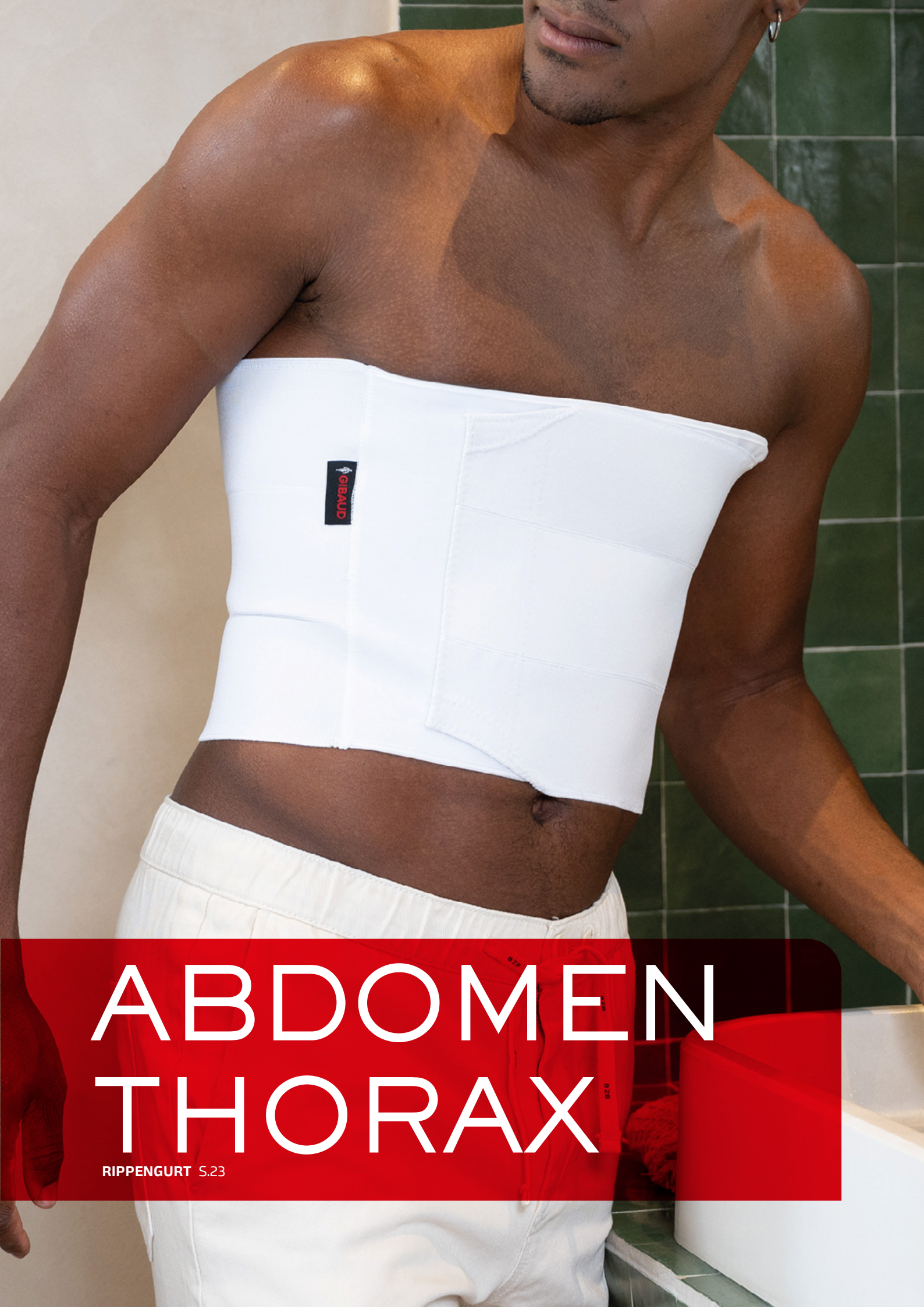

ABDOMEN THORAX


RIPPENGURT 5.23

ENTSCHEIDUNGSBAUM ABDOMEN / THORAX


WELCHE SITUATION?

CHRONISCH - PRÄVENTIV
(ODER IN AKUTPHASEN)


**AKUT /
NOTFALL**

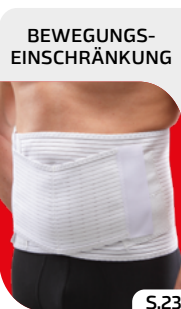

**ABDOMINAL-
STÜTZGURT**

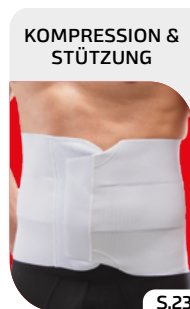

**BAUCHGURT
ELASTISCH**

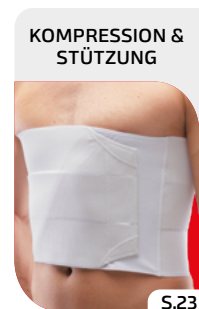

RIPPENGURT

Zerrungen der Bauchmuskeln oder
fragiler Bauchbereich

Rippenfraktur und
Rippenverletzung

ABDOMINALSTÜTZGURT

STÜTZUNG



Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen

INDIKATIONEN

Ohne Rückenschiene:

Bei Beschwerden im Unterbauch, für die eine Kompression nützlich sein kann, z.B.:

- Dehnung der Bauchmuskeln oder Schwächung des Abdomens

Mit Rückenschiene:

Bei Erkrankungen des Bauchbereichs, für die eine Kompression des Abdomens und eine Bewegungseinschränkung nützlich sein kann, darunter:

- Dehnung der Bauchmuskeln oder Schwäche im Bauchbereich (Wochenbett, postoperativ) verbunden mit: Ischias, Lumbago / Schmerzen im unteren Rückenbereich

DIE VORTEILE

- Klettverschluss
- Verstellbare Abdominal-Verstärkung
- Abdomen- und Lumbalbereich getrennt verstellbar

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
25 cm	18460			1	78 - 88	3322547076117	1572690
	18463			2	88 - 98	3322547076124	1572709
	18461	6364	Weiss	3	98 - 108	3322547076131	1572715
	18464			4	108 - 118	3322547076148	1572721
	18462			5	118 - 128	3322547295495	1887637

MiGel: 05.14.01.00.1

BAUCHGURT ELASTISCH

HALT



Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden im Bauchbereich, für die eine Kompression in Frage kommt, insbesondere in folgenden Fällen:

- Überdehnung der Bauchmuskeln oder Fragilität im Bauchbereich

DIE VORTEILE

- Verstellbarer Klettverschluss
- Drei elastische Bänder

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
24 cm	18459			1	61 - 75	3322546363188	1184657
	18455			2	76 - 90	3322546363195	1184663
	18458	6193	Weiss	3	91 - 105	3322546363201	1185237
	18457			4	106 - 120	3322546363218	1184686
	18456			5	121 - 135	3322547295440	1887620

MiGel: 05.11.10.00.1

RIPPENGURT

STÜTZUNG



Umfang des Thorax

- Mann: Den Umfang des Brustkorbs über den Brustwarzen (ohne Arme) messen
- Frau: Den Umfang des Brustkorbs unterhalb der Brust (ohne Arme) messen

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, für die eine Unterstützung im Bereich des Brustkorbs in Frage kommt, insbesondere in den folgenden Fällen:

- Rippenbruch
- Rippenprellung

DIE VORTEILE

- 3 elastische Bänder
- Klettverschluss

♀	Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
♀	24 cm	18452	6085	Weiss	1	70 - 95	3322546196755	1449825
		18451			2	95 - 120	3322546196762	1449831

Frauen - MiGel: 05.13.02.00.1

♂	Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
♂	24 cm	18453			1	70 - 100	3322546330432	1158708
		18454	6098	Weiss	2	100 - 130	3322546330449	1158714

Männer - MiGel: 05.13.02.00.1

HAND

MANUGIB® HAND-SEHNENENTZÜNDUNG S.27



ENTSCHEIDUNGSBAUM **HAND**

WELCHE SITUATION?

PRELLUNG

AKUT - DRINGEND

TRAUMATOLOGIE

DAUMEN
oder Daumensäule



FINGER



HANDGELENK



RUHIGSTELLUNG



S.26



S.26

MITTELGRADIGE
VERSTAUCHUNG

RUHIGSTELLUNG



S.26

**MANUGIB®
TRAUMA
HANDGELENK
DAUMEN**

**FINGER-
HANDGELENK
SCHIENE**

**MANUGIB®
TRAUMA
HANDGELENK**

Tendomyopathien, Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips, postoperative Verwendung, Skifahrer-Daumen, andere Verletzungen von weichem Gewebe

Verstauchungen, Zerrungen, Luxationen, stabile Frakturen

Leichte bis schwere Verstauchungen und Zerrungen, Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips, andere Verletzungen von weichem Gewebe

OHNE TRAUMA

CHRONIQUE - PRÉVENTION

RHEUMATOLOGIE

DAUMENBASIS
Trapezometakarpalgelenk



**DAUMENS-
SÄULE**
Ausstrahlung entlang
des Radius



HANDGELENK



BEHANDLUNG-
PROTOKOLL BEI
RHIZARTRHOSE

RUHIGSTELLUNG
/ ÜBERSETZUNG
FEHLT



S.28

RUHIGSTELLUNG ÜBERSETZUNG FEHLT



S.27



S.27

**MANUGIB®
RHIZARTRHOSE
FUNKTION**

**MANUGIB®
DAUMEN-
SEHNEN-
ENTZÜNDUNG**

**MANUGIB®
HAND-
SEHNEN-
ENTZÜNDUNG**

Arthrose des Trapeziometakarpalgelenks des Daumens

Tendovaginitis de Quervain (Sehnentzündung), Verletzung durch Überbeanspruchung von Handgelenk / Daumen, andere Verletzungen von weichem Gewebe

Tendinopathie des Daumens, Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips, Bursitis, Arthritis, andere Verletzungen von weichem Gewebe

MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK



BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG



Umfang des Handgelenks

Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, für die eine Ruhigstellung des Handgelenks in Frage kommt, insbesondere in folgenden Fällen:

- Leichte bis mässige Verstauchungen und Zerrungen
- Bursitis, Tendinitis, Arthritis
- Entwöhnung nach Gipsverband
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe

DIE VORTEILE

- Breite, anpassbare Handflächenschiene
- 3 Zuggurte
- Vollständige Bewegungsfreiheit der Finger

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18480		Schwarz	OR JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
18484			1R	14 - 16	3322544747904	5936841
18483			2R	17 - 19	3322544747911	5936864
18479	6508		3R	20 - 22	3322544747928	5936887
18481			OL JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311
18485			1L	14 - 16	3322544747935	5936858
18482			2L	17 - 19	3322544747942	5936870
18478			3L	20 - 22	3322544747959	5936893

MiGel: 22.07.03.00.1

EINSCHRÄNKUNG DER BEWEGUNGEN DES HANDGELENKS FLEXIBLE SCHIENE

MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK DAUMEN



BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG



Umfang des Handgelenks

Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, für die eine Ruhigstellung des Handgelenks und des Daumens in Frage kommt, insbesondere in folgenden Fällen:

- Trauma im Bereich Handgelenk / Daumen
- Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips
- Postoperative Verwendung
- Skifahrer-Daumen
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen
- Schränkt die Bewegungen von Handgelenk und Daumen ein
- 4 Zuggurte
- Abnehmbare, flexible Schienen

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18515		Blau	OR JUNIOR	10 - 14	3322541029034	6623883
18519			1R	14 - 18	3322541029058	6623914
18517	6650		2R	18 - 22	3322541029072	6623937
18514			OL JUNIOR	10 - 14	3322541029041	6623908
18518			1L	14 - 18	3322541029065	6623920
18516			2L	18 - 22	3322541029089	6623943

MiGel: 22.07.03.00.1

RUHIGSTELLUNG DER FINGER

FINGER HANDGELENK-SCHIENE

RELATIVE RUHIGSTELLUNG



Intrinsische Position



Länge der Hand

Die Länge zwischen dem Handgelenk und der Spitze des verletzten Fingers messen

INDIKATIONEN

Bei Verletzungen der Finger, für die eine Immobilisierung in Frage kommt, namentlich in folgenden Fällen:

- Verstauchung
- Luxation
- Zerrung
- Stabile Frakturen

DIE VORTEILE

- Anpassung der Schiene nach ärztlicher Anweisung
- Dorsale oder palmare Positionierung möglich entsprechend der Lokalisation der Verletzung
- Ruhigstellung in Syndaktilie: 2. Finger mit dem 3, oder 4. Finger mit dem 3

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Länge zwischen der Spitze des verletzten Fingers und dem Handgelenk in cm	GTIN	PHARMACODE
18489		Schwarz	1	< 13	3322541022721	5987732
18491	6610		2	13 - 17	3322541022738	5987749
18490			3	17 - 20	3322541022745	5987755
18488			4	20 - 23	3322541022752	5987761

MiGel: 22.06.04.00.1

MANUGIB® HAND-SEHNENENTZÜNDUNG

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

G Umfang des
HandgelenksDen Umfang des Handgelenks
unterhalb des Griffelfortsatzes
messen**INDIKATIONEN**Bei Beschwerden, für die eine Ruhigstellung des
Handgelenks in Frage kommt, insbesondere in
folgenden Fällen:

- Tendinopathie des Handgelenks.
- Entwöhnung nach einer Immobilisierung
- Bursitis
- Arthritis
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe
- Leichte bis mässige Verstauchungen und Zerrungen

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen
- Einschränkung der Bewegungen des Handgelenks
- Einzigartige Verstelllasche

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18556	6686	Blau	1R	13,5 - 15,5	3322541040121	7207187
18559			2R	15,5 - 18	3322541040145	7207201
18557			3R	18 - 21	3322541040169	7207224
18555			1L	13,5 - 15,5	3322541040138	7207193
18558			2L	15,5 - 18	3322541040152	7207218
18554			3L	18 - 21	3322541040176	7207230

MiGeL: 22.07.01.00.1

MANUGIB® DAUMEN-SEHNENENTZÜNDUNG

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

G Umfang des
HandgelenksDen Umfang des Handgelenks
unterhalb des Griffelfortsatzes
messen**INDIKATIONEN**Bei Beschwerden, für die eine Ruhigstellung des
Handgelenks und des Daumens in Frage kommt,
insbesondere in folgenden Fällen:

- Tendosynovitis de Quervain*
- Verletzung durch Überbeanspruchung von Handgelenk / Daumen
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe
- Skifahrer-Daumen

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen
- Seitliche Schiene gibt dem Daumensattelgelenk Halt
- Verstelllaschen (Handgelenk und Daumen)

* Daumensehnenentzündung

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18551	6685	Blau	1R	13,5 - 15,5	3322541040060	7207247
18553			2R	15,5 - 18	3322541040084	7207276
18550			3R	18 - 21	3322541040107	7207299
18548			1L	13,5 - 15,5	3322541040077	7207253
18552			2L	15,5 - 18	3322541040091	7207282
18549			3L	18 - 21	3322541040114	7207307

MiGeL: 22.07.01.00.1

NOTIZEN

.....

.....

.....



MANUGIB® RHIZARTHROSE FUNKTION

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG



INDIKATION

Arthrose des Daumensattelgelenks

DIE VORTEILE

- Stabilisierung des Daumens bis zum Handgelenk zum Erhalt der Greiffähigkeiten bei gleichzeitiger Schmerzlinderung
- Verstelllaschen (Daumen und Handgelenk)
- Futter aus Fleece-Mesh



Umfang des Handgelenks

Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18545	6683	Blau	1R	13,5 - 15,5	3322541039941	7207388
18547			2R	15,5 - 18	3322541039965	7207402
18543			3R	18 - 21	3322541039989	7207425
18544			1L	13,5 - 15,5	3322541039958	7207394
18546			2L	15,5 - 18	3322541039972	7207419
18542			3L	18 - 21	3322541039996	7207431

MiGel: 22.06.05.00.1

KOMPRESSIONSGEWEBE

STÜTZARM BAND

KOMPRESSION DES HANDGELENKS



INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Kompression des Handgelenks Indiziert ist:

- Zerrung
- Leichte Verstauchung
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe

VORTEIL

Das Produkt ermöglicht eine Kompression des Handgelenks



Umfang des Handgelenks

Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18447	5033	Schwarz	1	13 - 15	3322541011428	5159372
18448			2	15 - 17	3322541011435	5159389
18449			3	17 - 19	3322541011442	5159395
18450			4	19 - 21	3322541011459	5159403

MiGel: 05.07.10.00.1

STREBEN
AUS STAHL

KOMPRESSIONSGEWEBE

HANDGELENK-DAUMENBANDAGE

KOMPRESSION & HALT



INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, für die eine Kompression und/oder eine leichte Stützung des Handgelenks und des Daumens in Frage kommt, namentlich in folgenden Fällen:

- Zerrung
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe

DIE VORTEILE

- Das Produkt ermöglicht eine Kompression des Handgelenks
- Die Stahlstrebe bietet Handgelenk und Daumen Halt



Umfang des Handgelenks

Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18443	5005	Schwarz	1	14 - 15	3322544685046	3532795
18444			2	16 - 17	3322544685053	3534162
18445			3	18 - 19	3322544685060	3534156
18442			4	19 - 21	3322544685077	3534133

MiGel: 05.07.01.00.1



ELLBOGEN

ELBOWGIB® S.31

ENTSCHEIDUNGSBAUM

ELLBOGEN

WELCHE SITUATION?

CHRONISCH - PRÄVENTIV
(ODER IN AKUTEN PHASEN)

STÜTZUNG



S.31

ELBOWGIB®



S.31

TENNISELBOW

KOMPRESSION



S.31

ELLBOGENBANDAGE

Ellenbogenbeschwerden wie Epikondylitis

Mediale und laterale Epikondylitis
Schmerzen und Schwellungen
des Ellbogens

ELBOWGIB®

PATENTIERT

PATIENTIERTE KRÜMMUNG VERSTELLBARE SPANNBEFESTIGUNG



LINDERT SCHMERZEN IM ELLBOGEN



INDIKATION

Für Ellbogenverletzungen wie z.B. Epikondylitis

DIE VORTEILE

- Die halbstarre Struktur mit patentierter doppelter Biegung vermeidet Abschnüren, und die beiden Kompressions-Pelotten aus rutschhemmenden Silikon tragen zur Schmerzlinderung bei
- Der nicht dehnbare Gurt ermöglicht es, das Armband fest, aber doch bequem zu straffen



Umfang des Unterarms

Den Umfang des Unterarms unterhalb des Ellbogens messen

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Unterarms unterhalb des Ellbogens in cm	GTIN	PHARMACODE
18471			1	22 - 26	3322544632026	3596708
18472	6478	Grau	2	27 - 32	3322544632033	3596714
18470			3	33 - 38	3322544632057	3596720

MiGel: 22.08.06.00.1

SCHAUMSTOFFPELOTTEN

TENNIS ELBOW



LINDERT SCHMERZEN IM ELLBOGEN



INDIKATION

Bei Beschwerden des Ellbogens wie Epicondylitis

VORTEIL

Die beiden Kompressionspelotten aus Schaumstoff sorgen für eine Unterstützung

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse Einheitsgrösse	GTIN	PHARMACODE
18446	5006	Schwarz		3322544685336	7829185

MiGel: 22.08.06.00.1

KOMPRESSIONSGEWEBE WEICH & ATMUNGSAKTIV

ELLBOGENBANDAGE



KOMPRESSION



INDIKATIONEN

Ellbogenbeschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression indiziert ist:

- Mediale und laterale Epikondylitis
- Schmerzen und Schwellungen des Ellbogens
- Instabilität des Ellbogens

VORTEIL

Komprimierendes, weiches und luftdurchlässiges 3D Gewebe



Umfang des Unterarms

Den Umfang des Unterarms unterhalb des Ellbogens messen.

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Unterarm-Umfang in cm	GTIN	PHARMACODE
18561			1	22 - 24	3322541068354	7793688
18563			2	24 - 26	3322541068361	7793689
18564	6728	Blau	3	26 - 28	3322541068378	7793690
18562			4	28 - 30	3322541068385	7793691
18560			5	30 - 32	3322541068392	7793692

MiGel: 05.08.06.00.1

HERGESTELLT IN FRANKREICH IN UNSEREM WERK IN ST-ETIENNE



KNIE


GENUGIB® 3D GELENK S.37

ENTSCHEIDUNGSBAUM **KNIE**

WELCHE SITUATION?

OHNE TRAUMA CHRONISCH - PRÄVENTIV

RHEUMATOLOGIE

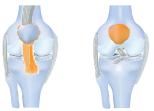

FEMOROPATELLARE SCHMERZEN


PATELLARSEHNEN-
TENDINOPATHIE & ARTHROSE

PROPRIOZEPTIVE
KOMPRESSION



S.37

GENUGIB®
PATELLA-KNIEBANDAGE

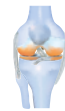

FEMOROTIBIALE SCHMERZEN (ARTHROSE)

OHNE INSTABILITÄT

WÄRMUNG



S.38

KNIEWÄRMER
CHALEUR

Patella-Tendinopathie
Arthrose
Chondromalacie
Knieschmerzen
Eindruck / Gefühl von Instabilität

Arthrose

WELCHE SITUATION?

PRELLUNG

CHRONISCH - SEKUNDÄRE PRÄVENTION

TRAUMATOLOGIE



BANDBEDINGTE SCHMERZEN



LEICHTE VERSTAUCHUNG

PROPRIOZEPTIVE KOMPRESSION



S.38

**GENUGIB®
3D**



S.38

**GENUGIB®
3D
BÄNDER
KNEIBANDAGE**

MITTELGRADIGE VERSTAUCHUNG

STABILISIERUNG (HALT)



S.37

**GENUGIB®
3D MIT
GELENK**



S.37

**GENUGIB®
OPEN**



S.36

STABILISIERUNG
BEWEGUNGSBEGREN-
ZUNG (FIXIERUNG)

**GENUGIB®
ROM**

**Verstauchungen
und leichte
Zerrungen**
Eindruck von
Instabilität
Knieschmerzen

Leichte Zerrung
Eindruck/ Gefühl
von Instabilität
Knieschmerzen
Chondromalacie

**Zerrung und leichte bis
mittelschwere mediale/laterale
Instabilität**

**Leichte bis mässige
Verstauchungen
und Instabilitäten
des vorderen
oder hinteren
Kreuzbandes
sowie der medialen
und lateralen
Kollateralbänder**

WELCHE SITUATION?

PRELLUNG

CHRONISCH - SEKUNDÄRE PRÄVENTION

TRAUMATOLOGIE



BANDBEDINGTE SCHMERZEN



SCHWERE VERSTAUCHUNG

RUHIGSTELLUNG
REGULIERUNG DER BEWEGUNGS-
REICHWEITE



S.36

GENUGIB®
POLY-C

RUHIGSTELLUNG



S.36

KNIESCHIENE
0° UNIVERSAL 3-TEILIG

**Postoperative / posttraumatische
Immobilisationen und/
oder Regulierung der
Bewegungsreichweite**

Traumatische Läsionen
Notfall-Immobilisationen
Prä-/ postoperative
Immobilisationen

KNIESCHIENE 0° UNIVERSAL 3-TEILIG

RUHIGSTELLUNG



1 Länge Oberschenkel / Wade

Die Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade messen

INDIKATIONEN

Bei Erkrankungen, für die eine Immobilisierung des Knies von Nutzen sein kann, insbesondere in folgenden Fällen:

- Traumatische Knieverletzungen
- Ruhigstellung im Notfall
- Prä-/postoperative Ruhigstellung des Knies

DIE VORTEILE

- Gurt zur Vorpositionierung
- 3-teilige Schiene, in der Breite verstellbar
- 4 halbrunde Zuggurte
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade in cm	GTIN	PHARMACODE
18606		Schwarz	1	40	3322541070548	7826025
18607	6910		2	50	3322541070555	7826026
18608			3	60	3322541070562	7826027
18605			4	70	3322541070579	7826028

MiGel: 22.04.03.00.1

VERZAHNTE POLYZENTRISCHE GELENKE

EINSTELLUNG DER AMPLITUDE DES GELENKS

GENUGIB® POLY-C

RUHIGSTELLUNG




INDIKATIONEN

Knieimmobilisierung nach der Operation/ einer Verletzung und/oder Kontrolle des Bewegungsumfangs.

DIE VORTEILE

- Silikonstück zur Einbettung der Tuberositas Tibiae
- Polyzentrische, verzahnte Gelenke mit Amplitudenverstellung

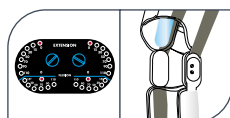

FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Einheitsgrösse	GTIN	PHARMACODE
40 cm	18473	6504	Schwarz		3322544706123	3595235

MiGel: 22.04.02.00.1

VORDERSEITE KOMPLETT ZU ÖFFNEN FÜR LEICHTERES ANLEGEN

VERZAHNTE POLYZENTRISCHE GELENKE MIT AMPLITUDENEINSTELLUNG

6 GURTE FÜR HALT UND GEGENHALT

GENUGIB® ROM

STABILISIERUNG



1 Umfang des Knies

Den Umfang des Knies (bei leicht gebeugter Haltung) in der Mitte der Kniescheibe messen

INDIKATIONEN

Bei Kniebeschwerden, für die eine Verstärkung der Stabilität im Kniebereich in Frage kommt, insbesondere in folgenden Fällen:

- Verstauchungen und leichte bis mittelschwere Instabilitäten des vorderen oder hinteren Kreuzbandes und der Seitenbänder (Innen- und Aussenband)

DIE VORTEILE

- Polyzentrische, verzahnte Gelenke mit Amplitudenverstellung
- Starre Seitenschielen
- Patella-Aussparung mit 2 Patella-Pelotten aus Halbringen zur Zentrierung der Kniescheibe
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an



Vorrichtungen zur Einstellung der Amplitude von Flexion und Extension

FLEXION	0°	45°	60°	75°	90°
EXTENSION	0°	10°	20°	30°	40°

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
18601		Blau	1	31 - 34	3322541070401	7826046
18597			2	34 - 37	3322541070418	7826047
18598	6902		3	37 - 40	3322541070425	7826048
18600			4	40 - 43	3322541070432	7826049
18599			5	43 - 46	3322541070449	7826050
18596			6	46 - 50	3322541070456	7826051

MiGel: 22.04.02.00.1

GENUGIB® OPEN

STABILISIERUNG



Umfang des Knies

Den Umfang des Knies (bei leicht gebeugter Haltung) in der Mitte der Kniescheibe messen

INDIKATIONEN

Für Kniebeschwerden, bei denen eine angemessene Unterstützung des Knies hilfreich ist, wie zum Beispiel:

- Leichte bis mittlere mediale/ laterale Knieinstabilitäten, Verstauchungen und Belastungen

DIE VORTEILE

- Vorderseite ganz zu öffnen für leichteres Anlegen und bessere Anpassung
- Patella-Aussparung mit 2 Patella-Pelotten aus Halbringen zur Zentrierung der Kniescheibe
- Polyzentrische verzahnte Gelenke
- Starre Seitenschienen, abnehmbar und anpassbar.
- 4 Gurte für Halt und Gegenhalt
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
18591	6900	Blau	1	31 - 34	3322541070289	7826040
18594			2	34 - 37	3322541070296	7826041
18595			3	37 - 40	3322541070302	7826042
18593			4	40 - 43	3322541070319	7826043
18592			5	43 - 46	3322541070326	7826044
18590			6	46 - 50	3322541070333	7826045

MiGel: 05.04.13.00.1

GENUGIB® 3D MIT GELENK

STABILISIERUNG

Durchbrochene
PlicaUmfang Knie und
Oberschenkel

Messen:

- Knieumfang
- Umfang 15 cm oberhalb des Knies

HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ÉTIENNE

INDIKATIONEN

Für Kniebeschwerden, bei denen eine angemessene Unterstützung des Knies hilfreich ist, wie zum Beispiel:

- Leichte bis mittlere mediale/ laterale Knieinstabilitäten, Verstauchungen und Belastungen

DIE VORTEILE

- 4 Gurte für 2 Anbringungsoptionen
- Bänderring
- Polyzentrische Knieprothesen
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen
- Bereich mit durchbrochener Plica
- Tricot 3D, dünn

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	Umfang 15 cm oberhalb des Knies	GTIN	PHARMACODE
18604	6904	Blau	2	33 - 38	40 - 50	3322541073143	1098574
18603			3	38 - 43	45 - 55	3322541073150	1098575
18602			4	43 - 48	50 - 60	3322541073167	1098576

MiGel: 05.04.13.00.1

GENUGIB® 3D PATELLA-KNIEBANDAGE

KOMPRESSION

MIT ÖFFNUNG
IN DER
KНИЕKEHLEUmfang Knie und
Oberschenkel

Messen:

- Knieumfang
- Umfang 15 cm oberhalb des Knies

HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ÉTIENNE

INDIKATIONEN

Kniebeschwerden, bei denen eine Komprimierung des Knies hilfreich ist, wie zum Beispiel:

- Tendinopathie der Patellasehle
- Patellofemorale Arthrose
- Chondromalazie
- Knieschmerzen
- Gefühl/Eindruck der Instabilität

DIE VORTEILE

- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2
- Silikon-Patellaring mit Stabilisierungsschiene
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen
- Antirutschsystem
- Öffnung im Bereich der Kniekehle

* Fähigkeit, die Position Ihres Körpers im Raum zu spüren.

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	Umfang 15 cm oberhalb des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
18619	6678B	Blau	1	28 - 33	35 - 45	3322541075062	1098588
18621			2	33 - 38	40 - 50	3322541075079	1098589
18623			3	38 - 43	45 - 55	3322541075086	1098590
18622			4	43 - 48	50 - 60	3322541075093	1098591
18620			5	48 - 53	55 - 65	3322541075109	1098592

MiGel: 05.04.12.00.1

GENUGIB® 3D BÄNDER-KNIEBANDAGE

KOMPRESSION



MIT ÖFFNUNG
IN DER
KNIEKEHLE



Umfang Knie und
Oberschenkel

Messen:

- Knieumfang
- Umfang 15 cm oberhalb des Knies



HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ÉTIENNE

INDIKATIONEN

Kniebeschwerden, bei denen eine Komprimierung des Knies hilfreich ist, wie zum Beispiel:

- Leichte Verstauchung
- Gefühl/Eindruck von Instabilität
- Knieschmerzen
- Chondromalazie
- Kniescheiben Sehnenreizung

DIE VORTEILE

- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2
- Verstärkte Seitenstäbe
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen
- Antirutschsystem
- Öffnung im Bereich der Kniekehle

* Fähigkeit, die Position Ihres Körpers im Raum zu spüren.

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	Umfang 15 cm oberhalb des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
18618		Blau	1	28 - 33	35 - 45	3322541075017	1098583
18615			2	33 - 38	40 - 50	3322541075024	1098584
18617	6677B		3	38 - 43	45 - 55	3322541075031	1098585
18616			4	43 - 48	50 - 60	3322541075048	1098586
18614			5	48 - 53	55 - 65	3322541075055	1098587

MiGel: 05.04.12.00.1

GENUGIB® 3D KNIEBANDAGE

PROPRIOZEPTIVE KOMPRESSION



MIT ÖFFNUNG
IN DER
KNIEKEHLE



Umfang Knie und
Oberschenkel

Messen:

- Knieumfang
- Umfang 15 cm oberhalb des Knies



HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ÉTIENNE

INDIKATIONEN

Kniebeschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression indiziert ist:

- Leichte Verstauchungen und Belastungen
- Gefühl/Eindruck der Instabilität
- Knieschmerzen

DIE VORTEILE

- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen
- Antirutschsystem
- Öffnung im Bereich der Kniekehle

* Fähigkeit, die Position Ihres Körpers im Raum zu spüren.

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	Umfang 15 cm oberhalb des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
18609		Blau	1	28 - 33	35 - 45	3322541074966	1098578
18612			2	33 - 38	40 - 50	3322541074973	1098579
18613	6676B		3	38 - 43	45 - 55	3322541074980	1098580
18611			4	43 - 48	50 - 60	3322541074997	1098581
18610			5	48 - 53	55 - 65	3322541075000	1098582

MiGel: 05.04.10.00.1

KNIEWÄRMER CHALEUR

HÄLT DIE WÄRME



Knieumfang

Knieumfang bei leichter Flexion in der Mitte der Kniescheibe

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, für die eine Unterstützung durch die wärmehaltenden Eigenschaften der Wolle in Frage kommt, namentlich in folgendem Fall:

- Arthrose

DIE VORTEILE

- Wolle, die die Körperwärme auf natürliche Weise hält
- Natürliche Modal®-Faser macht das Gewebe noch weicher und luftdurchlässig

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
18439		Anthrazit	S	31 - 36	3322541067593	7809782
18438	4299		M	36 - 41	3322541067609	7809783
18441			L	41 - 46	3322541067616	7809784
18440			XL	46 - 51	3322541067623	7809785



HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ÉTIENNE



SPRUNGGELENK

MALLEOGIB® 3D STRAP S.42

ENTSCHEIDUNGSBAUM

SPRUNGGELENK

WELCHE SITUATION?

AKUT - DRINGEND

RUHIGSTELLUNG /
BEWEGUNGS-
EINSCHRÄNKUNG



S.44

**WALKER
DEFEND AIR**

STABILISIERUNG / BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG



S.43

**SPRUNGGELENK-
ORTHESE
MIT LUFTKISSEN**



S.43

**SPRUNGGELENK-
ORTHESE
MIT
SCHAUMSTOFF**

Sprunggelenkverstauchungen 2. und 3. Grades

Postoperative Versorgung der
Bänder, Weichteile und Sehnen.

Stabile Frakturen der Fibula,
des Talus, des Kalkaneus und
des medialen Malleolus

Akute leichte bis starke Sprunggelenkverstauchungen

Entwöhnung nach einer Phase der Ruhigstellung
Post-chirurgischer Einsatz

CHRONISCH - PRÄVENTIV

EINSCHRÄNKUNG
VON
UMKEHRBEWEGUNGEN



S.42

MALLEOGIB®
3D STRAP

Leichte bis
mittelschwere
Verstauchungen

PROPRIOZEPTIVE
KOMPRESSION



S.42

MALLEOGIB®
3D

Rehabilitationsphase
nach einer Verletzung des
Sprunggelenks
Verstauchungen und leichte
Zerrungen
Funktionelle Instabilität

SPRUNGGELENKBANDAGEN

MALLEOGIB® 3D STRAP

PATENTIERT

PATENTIERTES
ANTIVARUSGURTSYSTEM

EINFACHES ANLEGEN
UND ANZIEHEN

STRAP
ENTHÄLT
LATEX

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION



INDIKATIONEN

Für Knöchelerkrankungen, die von einer Einschränkung der Kompression und Inversion profitieren können, wie zum Beispiel:

- Leichte bis mässige (nicht ödematöse) Verstauchungen
- Rehabilitation nach einer Sprunggelenkverletzung
- Leichte Instabilität

DIE VORTEILE

- Patentiertes beidseitiges Anti-Varus-Gurtsystem
- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen
- Spezifische Dekompressionszone mit Lochstruktur auf dem Rist

* Fähigkeit, die Position des eigenen Körpers im Raum zu spüren.



Knöchelumfang

Den Umfang oberhalb des Knöchels messen



HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ETIENNE

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Sprunggelenkumfang oberhalb des Knöchels in cm	GTIN	PHARMACODE
18537		Blau	1	18 - 20	3322541041791	7229585
18541			2	20,5 - 23	3322541041807	7229591
18540	6680		3	23,5 - 26	3322541041814	7229616
18539			4	26,5 - 29	3322541041821	7229622
18538			5	29,5 - 32	3322541041838	7229639

MiGeL: 05.02.14.00.1

EINFACHES
ANLEGEN LATEXFREI
UND ANZIEHEN

LATEXFREI

MALLEOGIB® 3D

KOMPRESSION



INDIKATIONEN

Für Sprunggelenkbeschwerden, bei denen eine Komprimierung des Sprunggelenks hilfreich ist, wie zum Beispiel:

- Rehabilitationsphase nach einer Verletzung des Sprunggelenks
- Leichte Verstauchungen und Belastungen
- Leichte Instabilität

DIE VORTEILE

- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen
- Spezifische Dekompressionszone mit Lochstruktur auf dem Rist

* Fähigkeit, die Position des eigenen Körpers im Raum zu spüren.



Knöchelumfang

Den Umfang oberhalb des Knöchels messen



HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ETIENNE

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Sprunggelenkumfang oberhalb des Knöchels in cm	GTIN	PHARMACODE
18533		Blau	1	18 - 20	3322541041746	7229527
18536			2	20,5 - 23	3322541041753	7229533
18535	6679		3	23,5 - 26	3322541041760	7229556
18534			4	26,5 - 29	3322541041777	7229562
18532			5	29,5 - 32	3322541041784	7229579

MiGeL: 05.02.11.00.1

NOTIZEN

SPRUNGGELENKORTHESEN

SPRUNGGELENKORTHESE MIT LUFTKISSEN

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION



INDIKATIONEN

Für Erkrankungen, die von einer Knöchelinversions-/Eversionsbeschränkung profitieren können, wie zum Beispiel:

- Akute leichte bis schwere Knöchelverstauchungen
- Chronische Knöchelinstabilität
- Entwöhnung nach Gipsverband oder Ruhigstellungsorthesen
- Rehabilitation nach Knöchelverletzungen und/oder postoperative Anwendung

VORTEIL

Mit aufblasbaren Luftkissen anpassbare anatomische Form.

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Einheitsgrösse*	GTIN	PHARMACODE
18486	6522	Weiss	1	3322544210507	4091666

MiGel: 22.02.01.00.1

* Schuhgrösse von 35 bis 46

SPRUNGGELENKORTHESE MIT SCHAUMSTOFF

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION



INDIKATIONEN

Umstände, die eine Inversions- und Eversionsbeschränkung erfordern, einschliesslich:

- Leichte bis schwere akute Knöchelverstauchungen
- Chronische Knöchelinstabilität
- Entwöhnung nach einer Immobilisierung mit Gipsverband oder Ruhigstellungsorthese
- Rehabilitation nach Knöchelverletzungen und/oder postoperative Anwendung

DIE VORTEILE

- Robuster Schaumstoff
- Hartschalen beidseitig

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Einheitsgrösse*	GTIN	PHARMACODE
18468	6413	Weiss	1	3322547843023	2664767

MiGel: 22.02.01.00.1

* Schuhgrösse von 35 bis 46

SPRUNGGELENKORTHESE JUNIOR

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION



INDIKATIONEN

Umstände, die eine Inversions-/Eversionsbeschränkung erfordern, einschliesslich:

- Akute, leichte bis schwere Verstauchung des Sprunggelenks.
- Chronische Instabilität des Sprunggelenks
- Entwöhnung nach einer Zeit der Ruhigstellung mit Gips oder Walker
- Rehabilitation nach Verletzungen des Sprunggelenks und /oder postoperativer Einsatz

DIE VORTEILE

- Feste, anatomisch geformte Schalen, links und rechts einsetzbar
- Elastischer Schaumstoff
- An die kindliche Morphologie angepasster Hebelarm

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Schuhgrösse (< 35)	GTIN	PHARMACODE
18487	6597	Schwarz	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

MiGel: 22.02.01.00.1

WALKER

DIE VORTEILE

- Dickes Schaumstoffpolster in Innensohle, Knöcheln und Ferse
- Stossdämpfende Sohle
- Abgerundete Sohle
- Gehschuh mit Schale
- Langer Gehschuh: 3 Gurte
- Kurzer Gehschuh: 2 Gurte

WALKER DEFEND AIR

RUHIGSTELLUNG



INDIKATIONEN

- Sprunggelenkverstauchungen 2 und 3 Grades
- Nach chirurgischen Eingriffen an den Bändern, weichem Gewebe und Sehnen
- Stabile Fraktur der Fibula, des Talus, des Calcaneus und des Malleolus Medialis

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Schuhgrösse	Höhe	GTIN	PHARMACODE
18586		Blau	2	36 - 40	h 24 cm	4719894925233	1104833
18584	6757		3	40 - 43	h 25 cm	4719894925240	1104834
18585			4	43 - 46	h 28 cm	4719894925257	1104835

MiGel: 22.03.03.00.1

WALKER DEFEND AIR SHORT

RUHIGSTELLUNG



INDIKATIONEN

- Sprunggelenkverstauchungen 2 und 3 Grades
- Nach chirurgischen Eingriffen an den Bändern, weichem Gewebe und Sehnen
- Stabile Fraktur der Fibula, des Talus, des Calcaneus und des Malleolus Medialis

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Schuhgrösse	Höhe	GTIN	PHARMACODE
18589		Blau	2	36 - 40	h 24 cm	4719894925196	1104837
18588	6758		3	40 - 43	h 25 cm	4719894925202	1104838
18587			4	43 - 46	h 28 cm	4719894925219	1104839

MiGel: 22.03.03.00.1

FERSENEINLAGEN

FERSENEINLAGEN



FERSENERHÖHUNG

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, für die eine Erhöhung der Ferse in Frage kommt, namentlich in folgenden Fällen:

- Tendinopathie der Achillessehne
- Fersenschmerzen
- Fersensporn

VORTEIL

Stützbereich zum besseren Aufsetzen der Ferse.



Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Höhe	Grösse	Schuhgrösse	GTIN	PHARMACODE
18466		Blau	8 mm	1	34 - 38	3322547076087	5921420
18467	6369		8,5 mm	2	39 - 42	3322547076094	5921437
18465			8,5 mm	3	43 - 48	3322547076100	5921443

Paarweise verkauft



HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ETIENNE

JUNIOR

CERVICALSTÜTZEN C1 S.46



CERVICALSTÜTZEN C1 WEICH - MIT SCHUTZÜBERZUG

STÜTZUNG



A Cervicalstütze

- Umfang am Halsansatz
- Höhe Brustbeingabel - Kinn-Unterseite Blick geradeaus

INDIKATIONEN

Leichte Beschwerden am Hals oder Pathologien, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Ruhigstellung der Halswirbelsäule indiziert ist:

- Extensionstrauma des Halses Schleudertrauma
- Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule
- Zervikale Spondylose/zervikale Osteoarthritis
- Rheumatoide Arthritis der Halswirbelsäule

DIE VORTEILE

- Schränkt den Bewegungsradius der Halswirbelsäule ein
- Abnehmbarer Schutzüberzug

Art.-Nr. UHLMANN	Art.-Nr. GIBAUD	Farbe	Grösse	Umfang am Halsansatz in cm	Höhe	GTIN	PHARMACODE
18493	6625	Grau	0 JUNIOR	28 - 34	6 cm	3322541024152	6270887

MiGel: 22.12.01.00.1

ARM-SCHULTER-BANDAGE

RUHIGSTELLUNG



E Umfang des Thorax + Humerus

Den Umfang des Thorax unter der Brust + Oberarm (nur ein Arm) messen

* Wenn beim Messen das Ergebnis nahe an der nächsten Grösse liegt, empfehlen wir Ihnen die nächstgrössere Grösse zu wählen.

INDIKATIONEN

Beschwerden mit der Schulter, bei denen eine Ruhigstellung des Schulterblattbereichs mit dem seitlich am Körper anliegenden Ellbogen insbesondere in den folgenden Fällen indiziert ist:

- Instabilitäten/Verletzungen der Schulter
- Vor oder nach einem operativen Eingriff
- Abheilen/Überdehnung von weichem Gewebe

VORTEIL

Leichtes Gewebe.

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Grösse* Umfang des Thorax unterhalb der Brust + Oberarm in cm	GTIN	PHARMACODE
18424	4209	Schwarz	0 JUNIOR	< 45	3322541008060	4791406
18423			1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077	4791398

MiGel: 22.09.01.00.1

SPRUNGGELENKORTHESE JUNIOR

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION



INDIKATIONEN

Umstände, die eine Inversions-/Eversionsbeschränkung erfordern, einschliesslich:

- Akute, leichte bis schwere Verstauchung des Sprunggelenks.
- Chronische Instabilität des Sprunggelenks
- Entwöhnung nach einer Zeit der Ruhigstellung mit Gips oder Walker
- Rehabilitation nach Verletzungen des Sprunggelenks und /oder postoperativer Einsatz

DIE VORTEILE

- Feste, anatomisch geformte Schalen, links und rechts einsetzbar
- Elastischer Schaumstoff
- An die kindliche Morphologie angepasster Hebelarm

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Schuhgrösse (< 35)	GTIN	PHARMACODE
18487	6597	Schwarz	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

MiGel: 22.02.01.00.1

MANUGIB® HANDGELENK-TRAUMA

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

Umfang des
HandgelenksDen Umfang des Handgelenks
unterhalb des Griffelfortsatzes
messen**INDIKATIONEN**

Bei Beschwerden, für die eine Ruhigstellung des Handgelenks in Frage kommt, insbesondere in folgenden Fällen:

- Leichte bis mässige Verstauchungen und Zerrungen
- Bursitis, Tendinitis, Arthritis
- Entwöhnung nach Gipsverband
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe

DIE VORTEILE

- Breite, anpassbare Handflächenschiene
- 3 Zuggurte
- Vollständige Bewegungsfreiheit der Finger

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18480	6508	Schwarz	OR JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
18481			OL JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311

MiGeL: 22.07.03.00.1

MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK DAUMEN

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

Umfang des
HandgelenksDen Umfang des Handgelenks
unterhalb des Griffelfortsatzes
messen**INDIKATIONEN**

Bei Beschwerden, für die eine Ruhigstellung des Handgelenks und des Daumens in Frage kommt, insbesondere in folgenden Fällen:

- Trauma im Bereich Handgelenk / Daumen
- Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips
- Postoperative Verwendung
- Skifahrer-Daumen
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen
- Schränkt die Bewegungen von Handgelenk und Daumen ein.
- 4 Zuggurte
- Abnehmbare, flexible Schienen

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
18515	6650	Blau	OR JUNIOR	10 - 14	3322541029034	6623883
18514			OL JUNIOR	10 - 14	3322541029041	6623908

MiGeL: 22.07.03.00.1

NOTIZEN

WOLLE

NIERENWÄRMER CHALEUR S.49 (S.19)



NIERENWÄRMER CHALEUR

HÄLT DIE WÄRME



INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, bei denen die wärmeisolierenden Eigenschaften der Wolle insbesondere in den folgenden Fällen helfen können:

- Schmerzen im unteren Rückenbereich

DIE VORTEILE

- Wolle, die die Körperwärme auf natürliche Weise hält
- Natürliche Modal®-Faser macht das Gewebe noch weicher und luftdurchlässig

Weich, luft durchlässig und bequem.

**T** Taillenumfang

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen

HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ETIENNE

Höhe	Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
25 cm	18427	4292	Anthrazit	S	61 - 75	3322541067326	7809767
	18429			M	75 - 90	3322541067333	7809768
	18428			L	90 - 105	3322541067340	7809769
	18426			XL	105 - 120	3322541067357	7809770
30 cm	18435	4297	Anthrazit	M	75 - 90	3322541067524	7809775
	18437			L	90 - 105	3322541067531	7809776
	18434			XL	105 - 120	3322541067548	7809777
	18436			XXL	120 - 135	3322541067555	7809778
25 cm	18432	4293	Ecrû	S	61 - 75	3322541067364	7809771
	18433			M	75 - 90	3322541067371	7809772
	18431			L	90 - 105	3322541067388	7809773
	18430			XL	105 - 120	3322541067395	7809774

KNIEWÄRMER CHALEUR

HÄLT DIE WÄRME



INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, für die eine Unterstützung durch die wärmehaltenden Eigenschaften der Wolle in Frage kommt, namentlich in folgendem Fall:

- Arthrose

DIE VORTEILE

- Wolle, die die Körperwärme auf natürliche Weise hält
- Natürliche Modal®-Faser macht das Gewebe noch weicher und luftdurchlässig

Art.-Nr. Uhlmann	Art.-Nr. Gibaud	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
18439	4299	Anthrazit	S	31 - 36	3322541067593	7809782
18438			M	36 - 41	3322541067609	7809783
18441			L	41 - 46	3322541067616	7809784
18440			XL	46 - 51	3322541067623	7809785

**K** Knieumfang

Knieumfang bei leichter Flexion in der Mitte der Kniescheibe

HERGESTELLT IN FRANKREICH
IN UNSEREM WERK IN ST-ETIENNE

NOTIZEN

GIBAUD

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY



Uhlmann Eyraud

Innovation for better health

**ALLE UNSERE PRODUKTE SIND BEI IHREM
GROSSISTEN ERHÄLTlich**

GIBAUD

Eine Marke
der Innothera-
Gruppe



www.gibaud.ch

FOLGEN SIE UNS:



Mitglied der Verbände

OX-Med

und

SWISS MEDTECH

SIE ERREICHEN UNS UNTER:

Kundendienst: service@uhlmann.ch

Bestellungen: bestellungen@uhlmann.ch

Telefon: +41 58 272 54 00

F. Uhlmann-Eyraud SA

Ateliergasse 1 - CH-5600 Lenzburg

www.uhlmann.ch

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 2026
sind auf unserer Website www.uhlmann.ch
verfügbar.



Kundennummer



7352104