



ORTHOPÄDIE

GESAMTKATALOG
SCHWEIZ 2024-2025



GIBAUD

UNSERE DNA


INNOTHERA ist ein einhundert Jahre alter französischer Familienbetrieb im Gesundheitsbereich.

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Behandlung von alltäglichen Erkrankungen weltweit und können dabei auf das Engagement unserer 1'500 Mitarbeitenden zählen.

UNSERE THERAPIEBEREICHE

Sie umfassen drei Hauptzweige:

- **Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL** für Medikamente,
- **Laboratoires INNOTHERA** für elastische Kompressionsstrümpfe, Orthopädie und Podologie,
- **CLEANIS** für Hygiene- und Schutzprodukte.

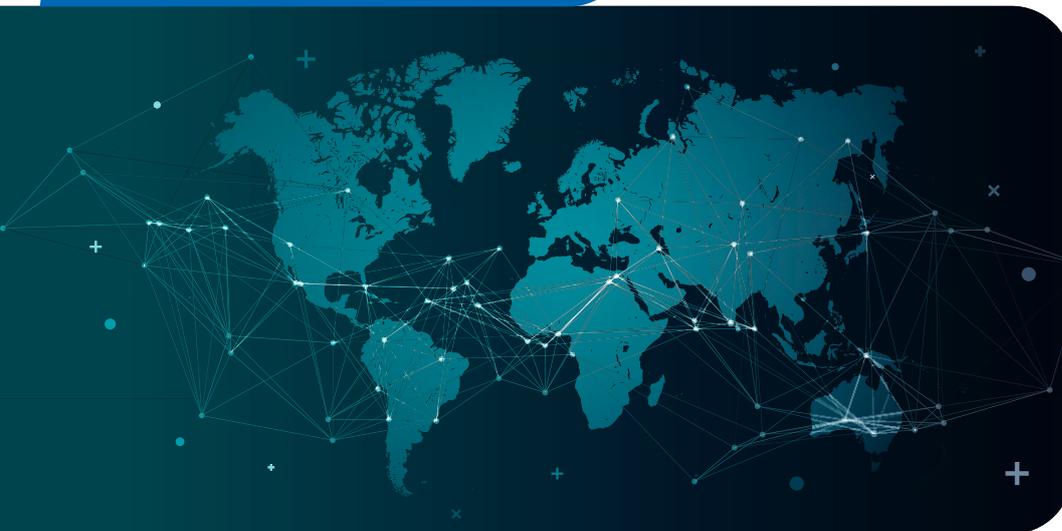

UNSERE INTERNATIONALE PRÄSENZ

INNOTHERA vertreibt seine Produkte in über 100 Ländern weltweit.

UNSERE MARKEN

Legger®

SMARTLEG®

Actys®

GIBAUD

Cleanis
CREATIVE HYGIENE



Geschätzte Partnerinnen und Partner,

Seit 110 ans Jahren entwickelt, produziert und vertreibt Innothéra, ein unabhängiges französisches Unternehmen, Medikamente, medizinische Geräte und Hygieneprodukte, mit der Hauptmission, die Behandlung von Krankheiten im Alltag nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz Schritt für Schritt und kontinuierlich zu verbessern.

Wir setzen uns für Lösungen ein, die auf Wissenschaft, Technik und Innovation basieren. Dieser Ansatz liegt in der DNA unseres Unternehmens und orientiert sich an unserer besonderen Sensibilität für medizinische Themen.

Das Comeback der ikonischen Marke Gibaud in Verbindung mit einem umgestalteten, moderneren und dynamischeren Markendesign, trägt zur Kohärenz und visuellen Identität unserer Produkte bei und unterstützt unser schlüssiges, umfassendes innovatives Angebot. Dieses Engagement gilt auch für die Schweiz: Hier möchten wir unsere Marktpräsenz konsolidieren und unseren Einfluss ausbauen und so dazu beitragen, die besonderen Herausforderungen des Landes im Gesundheitsbereich aufzudecken.



Arnaud Gobet

Präsident
Generaldirektor
der INNOTHERA
Gruppe

Natürlich steht dabei unser Engagement für unsere Kundinnen und Kunden immer im Mittelpunkt unseres Handelns.

Dieser Katalog basiert auf neuen Entscheidungsbäumen. Diese wurden mit unseren Experten ausgearbeitet und umstrukturiert. Sie sollen Ihre Beratungsaufgaben erleichtern, Ihnen einen direkten, schnellen Zugang zu Produktinformationen ermöglichen und Sie bei der Bereitstellung von angemessenen Lösungen unterstützen, immer mit dem grossen Ziel, eine bessere Gesundheit für alle, in der Schweiz wie überall, zu fördern.


Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüssen

Arnaud Gobet



INHALTSÜBERS

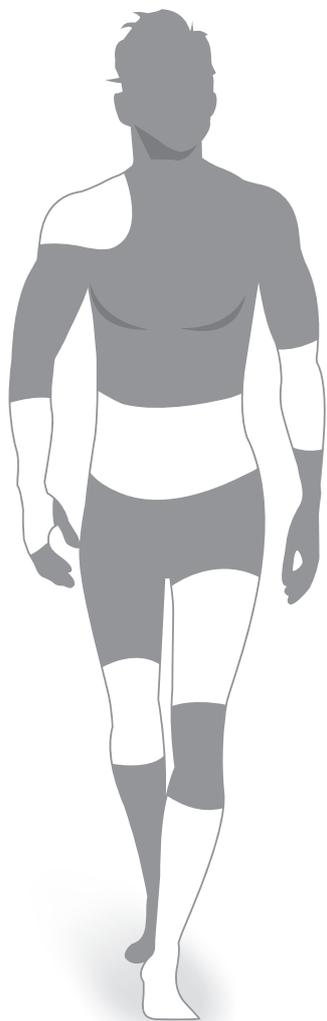

*Keep
moving!*

MASS NEHMEN S. 4

HALS • SCHULTER

ENTSCHEIDUNGSBAUM HALS	S. 10
Cervicalstützen c1 weich	12
Cervicalstützen c2 verstärkt	13
Cervicalstützen c3 rigid ohne Kinnstütze	13
Cervicalstützen c3 rigid mit Kinnstütze	13
ENTSCHEIDUNGSBAUM SCHULTER	S. 14
Arm-Schulter-Bandage einheitsgrösse	17
Arm-Schulter-Bandage	17
Schlüsselbeinbandage	18
Armschlinge mit Tasche	18
Armschlinge	19
Schulterwärmer Chaleur	19

RÜCKEN • ABDOMEN • THORAX

ENTSCHEIDUNGSBÄUMEN RÜCKEN	S. 20
Lombogib® Finesse	23
Lombogib® Double Action	24
Lombogib® Evolution	25
Lombogib® Progressiv	26
Rücken-Geradehalter	26
Lombogib® Maternity	27
Nierenwärmer chaleur	28
ENTSCHEIDUNGSBAUM ABDOMEN	S. 31
Abdominalstützgurt	32
Bauchgurt elastisch	32
Leistenbruchband	33
Rippengurt	33

ICHT

HAND • ELLBOGEN

ENTSCHEIDUNGSBÄUMEN HAND	S. 34
Manugib® Trauma Handgelenk	37
Manugib® Trauma Handgelenk lang	37
Manugib® Trauma Handgelenk Daumen	37
Finger-Handgelenk-Schien	38
Manugib® Hand-Sehnenentzündung	38
Manugib® Daumen-Sehnenentzündung	39
Manugib® Rhizarthrose Funktion	39
Manugib® Karpaltunnel	40
Handgelenk Daumen Bandage	40
Kraftarmband	41
Stützarmband	41
ENTSCHEIDUNGSBAUM ELLBOGEN	S. 42
Elbowgib®	44
Tennis Elbow	44
Ellbogenbandage	45

KNIE

ENTSCHEIDUNGSBÄUMEN KNIE	S. 46
Knieschiene 0° universal 3-teilig	51
Knieschiene 0°/20° standard 1-teilig	51
Genugib® Poly-C	52
Genugib® Post-Op	52
Genugib® ROM	52
Genugib® Open	53
Genugib® Stab	53
Genugib® 3D mit Gelenk	54
Genugib® 3D Patella-Kniebandage	54
Genugib® 3D Bänder-Kniebandage	55
Genugib® 3D	55
Quadrigib® 3D	56
Knie Spange	56
Kniebandage DV4	57
Kniebandage chaleur	57

SPRUNGGELENK • FUSS

ENTSCHEIDUNGSBAUM SPRUNGGELENK	S. 58
Orthesen:	
• Sprunggelenkorthese mit Luftkissen	61
• Sprunggelenkorthese mit Schaumstoff	61
• Sprunggelenkorthese Junior	61
Malleogib® 3D Strap	62
Malleogib® 3D	62
Walker:	
• Defend Air	63
• Defend Air Short	63
Post-Op Entlastungsschuh:	
• Vorderfuss kurz	64
• Vorderfuss lang	64
• Fersen	64
Hallux Valgus Korrekturbandage	65
Fersebeinlagen	65


PRODUKTREIHE JUNIOR

Cervicalstützen C1 weich mit Schutzüberzug	66
Arm-Schulter-Bandage	67
Armschlinge mit Tasche	67
Rücken-Geradehalter	67
Schlüsselbeinbandage	67
Manugib® Trauma Handgelenk	68
Manugib® Trauma Handgelenk lang	68
Manugib® Trauma Handgelenk Daumen	68
Knieschiene 0° universal 3-teilig	69
Knieschiene 0°/20° standard 1-teilig	69

THERMOTHERAPIE


• Nierenwärmer Chaleur	28
• Schulterwärmer Chaleur	19
• Kniewärmer Chaleur	57

GELENKE UND RÜCKEN MASS NEHMEN

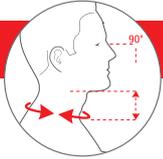

A CERVICALSTÜTZE

- Umfang am Halsansatz
- Höhe Brustbeingabel - Kinn- Unterseite Blick geradeaus.

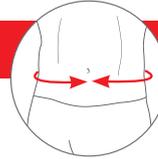


B TAILLEUMFANG

- Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen.
- Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht.
- Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.




E UMFANG DES THORAX

- Mann: Den Umfang des Brustkorbs über den Brustwarzen (ohne Arme) messen.
- Frau: Den Umfang des Brustkorbs unterhalb der Brust (ohne Arme) messen.

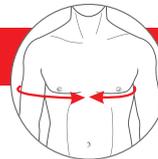


F UMFANG DES THORAX + HUMERUS

- Den Umfang des Thorax unter der Brust + Oberarm (nur ein Arm) messen.

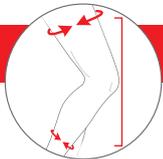


I LÄNGE SCHENKEL / WADE

- Die Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade messen.

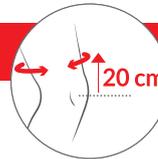

J UMFANG DES SCHENKELS

- Den Schenkelumfang 20 cm oberhalb der Mitte der Kniescheibe messen.

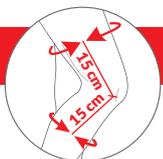


M UMFANG VON SCHENKEL & WADE

- Messen:
- Umfang 15 cm oberhalb der Mitte der Kniescheibe.
 - Umfang 15 cm unterhalb der Mitte der Kniescheibe.




N UMFANG KNIE & SCHENKEL

- Messen:
- Knieumfang.
 - Umfang 15 cm oberhalb des Knies.

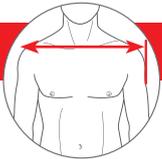

C ABSTAND SCHULTER ZU SCHULTER

- Den Abstand von Schulter zu Schulter (auf dem Rücken) messen.

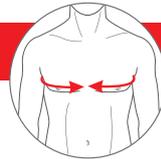

D BRUSTUMFANG

- Den Brustumfang auf der Brust (ohne Arme) messen.



G UMFANG DES HANDGELENKS

- Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen.




H LÄNGE DER HAND

- Die Länge zwischen dem Handgelenk und der Spitze des verletzten Fingers messen.




K SCHENKELUMFANG

- Den Schenkelumfang 15cm oberhalb der Mitte der Kniescheibe messen.

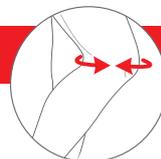

L UMFANG DES KNIES

- Den Umfang des Knies (bei leicht gebeugter Haltung) in der Mitte der Kniescheibe messen.

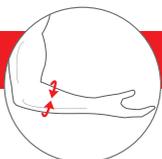

O UMFANG DES UNTERARMS

- Den Umfang des Unterarms unterhalb des Ellbogens messen.



P KNÖCHELUMFANG

- Den Umfang oberhalb des Knöchels messen.

Bereits

über 5'000

Gesundheitsfachleute
vertrauen uns.

Schulungen sind Teil unserer DNA

SCHULUNGEN
VOR ORT BEI IHNEN

**GIBAUD
ACADEMY**

Schulungen in Ihrer Apotheke durch Ihre(n)
Delegierte(n)*.

Schulungen mit unterschiedlichen **Niveaus**,
angepasst an Ihre Bedürfnisse
und Ihre **Entwicklungsziele**

(* zu Partnerschafts-Bedingungen)

BAUEN SIE **EXPERTISE AUF**

ORTHO
FORTBILDUNGSSEMINARE

Seit 2018 ist Orthophar

Ihr Partner in der Schweiz
für Schulungen

Im Bereich serienmässige Hilfsmittel

ORTHOPÄDIE IN DER
APOTHEKE BERATUNG
UND VERKAUF



Mobilisieren Sie Ihr Team, betreiben Sie **Patien**

Ihr Wachstum erfolgt durch die Weiterentwicklung Ihrer Expertise. Um Ihre Patientinnen und Patienten immer besser beraten können, **vertrauen Sie unserem Team!**

Kontaktieren
Sie Ihre
Ansprechperson

VERSCHIEDENE THEMEN:

Der dazugehörige Verkauf Die Verstauchung und die Standfestigkeit unserer Senioren Abgabehilfe Die Wiederaufnahme der Tätigkeiten Die Mutterschaft Lumbago



Weitere
Auskünfte und
Anmeldeformular



ZWEI MODULE

- **Modul 1:** Kernkompetenzen und Abgabepaxisg
- **Modul 2:** Ergänzende Kenntnisse und Praxis-Workshop




STÄRKEN SIE IHR FACHWISSEN...

ntenbindung und **fördern Sie** Ihre Bekanntheit!

WEB

Neue Internetseite **GIBAUD**

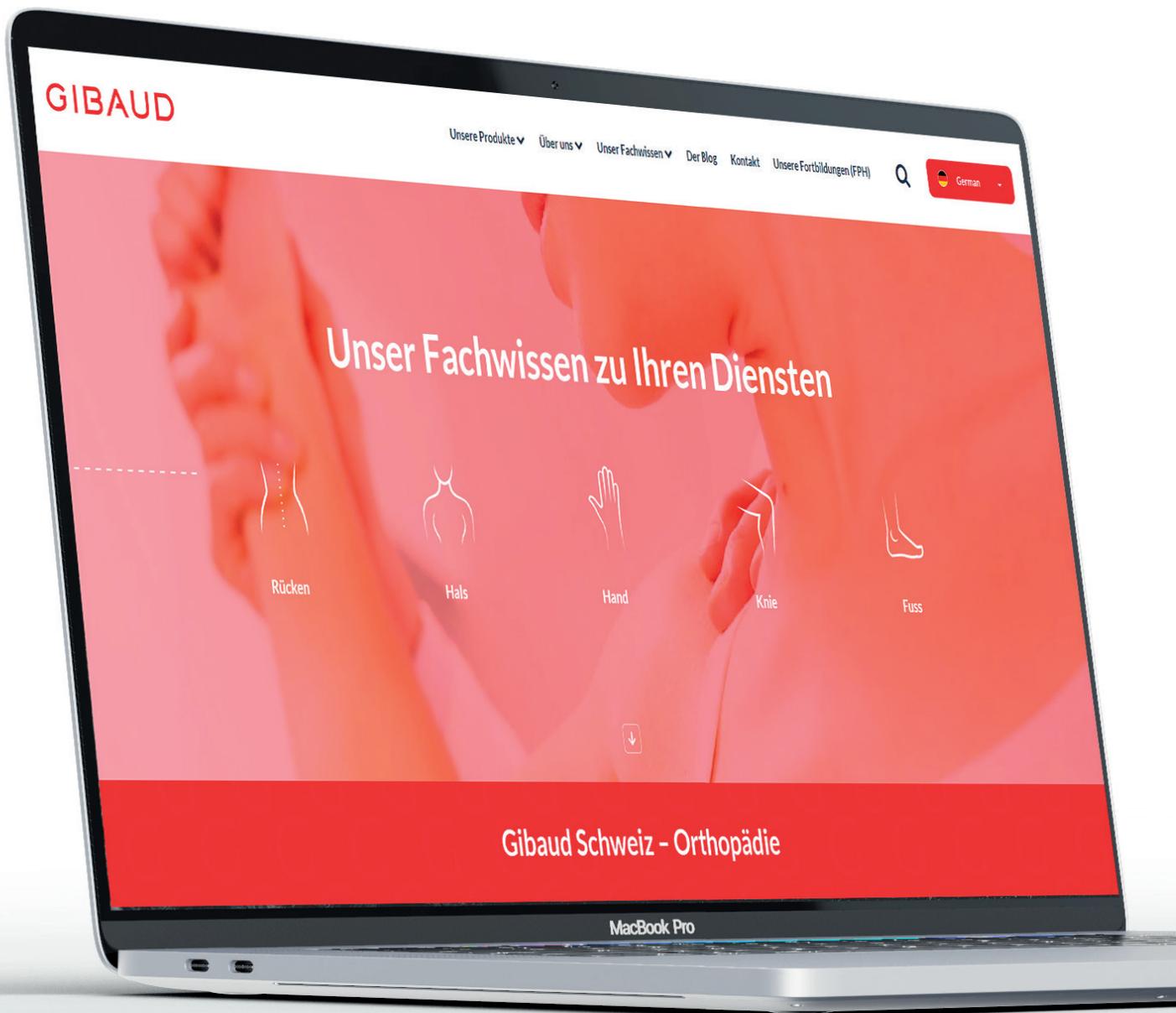

www.gibaud.ch

- Unsere Mission
- Unser Fachwissen
- Unsere Produkte
- Über uns
- Der Onlinekatalog
- Der Blog
- Die Fortbildungen (FPH)



ORTHO
FPH
FORTBILDUNGSSEMINARE

Hier erhalten Sie
weitere Informationen



ENTSCHEIDUNGSBAUM HALS

— WELCHE SITUATION? —

AKUT - DRINGEND

— WELCHES ZIEL? —

STARKE BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)

MITTELSCHWERE BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)

— DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD —



**CERVICALSTÜTZEN
C3**
(mit oder ohne Kinnstütze)



**CERVICALSTÜTZEN
C2**

— INDIKATIONEN —

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einem Trauma

- Leichte Verletzungen der Halswirbelsäule

Extensionstrauma des Halses

CHRONISCH - PRÄVENTIV

LEICHTE BEWEGUNGSEIN-
SCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)

MITTELSCHWERE BEWE-
GUNGSEINSCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)

LEICHTE BEWEGUNGSEIN-
SCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)



CERVICALSTÜTZEN
C1



CERVICALSTÜTZEN
C2



CERVICALSTÜTZEN
C1

Extensionstrauma des Halses

Arthrose der Halswirbelsäule • Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule

HALS

CERVICALSTÜTZEN C1 WEICH | S.12



CERVICALSTÜTZEN C1 WEICH MIT SCHUTZÜBERZUG

STÜTZUNG

INDIKATIONEN

Leichte Beschwerden am Hals oder Pathologien, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule Linderung verschaffen kann:

- Extensionstrauma des Halses (Verstauchung der Halswirbelsäule).
- Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule
- Arthrose der Halswirbelsäule.

Art.-Nr.	Farbe	Höhe	Umfang am Halsansatz in cm und Wahl der Höhe				
			28 - 31 0 JUNIOR	29 - 34 1	35 - 40 2	41 - 46 3	47 - 52 4
6625	Grau	6 cm	3322541024152 6270887				
6626		7,5 cm		3322541024169 6270893	3322541024176 6270901	3322541024183 6270918	3322541024190 6270924
6627		8,5 cm		3322541024206 6270930	3322541024213 6270947	3322541024220 6270953	3322541024237 6270976
6628		9,5 cm		3322541024244 6270982	3322541024251 6270999	3322541024268 6271007	3322541024275 6271013

MiGel: 22.12.01.00.1



CERVICALSTÜTZEN C2 VERSTÄRKT MIT ABNEHMBARER VERSTEIFUNG

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Leichte Beschwerden am Hals oder Pathologien, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule Linderung verschaffen kann:
- Extensionstrauma des Halses (Verstauchung der Halswirbelsäule).
 - Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule
 - Arthrose der Halswirbelsäule.

DIE VORTEILE

- Abnehmbarer Schutzbezug.
- Schränkt den Bewegungsradius der Halswirbelsäule ein.
- Abnehmbare Verstärkung aus Polypropylen.

Art.-Nr.	Farbe	Höhe	Umfang am Halsansatz in cm und Wahl der Höhe			
			29 - 34 1	35 - 40 2	41 - 46 3	47 - 52 4
6636	Grau	7,5 cm	3322541024534	3322541024541	3322541024558	3322541024565
			6271036	6271042	6271059	6271065
6637		8,5 cm	3322541024572	3322541024589	3322541024596	3322541024602
			6271071	6271088	6271094	6271102
6638		9,5 cm	3322541024619	3322541024626	3322541024633	3322541024640
			6271119	6271125	6271131	6271148

MiGeL: 22.12.02.00.1



CERVICALSTÜTZEN C3 RIGID OHNE KINNSTÜTZE

RELATIVE RUHIGSTELLUNG / BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule Linderung verschaffen kann:
- Behandlung von Traumatpatienten.
 - Mittelschwere zervikale Läsionen
 - Andere Pathologien, die eine Ruhigstellung der Halswirbelsäule erfordern.

DIE VORTEILE

- Höhenverstellbar zwischen 8,5 und 12 cm.
- Schränkt den Bewegungsradius der Halswirbelsäule ein.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang am Halsansatz in cm	GTIN	PHARMACODE
6596	Weiss	00	29 - 32	3322541016959	5874904
		0	32 - 35	3322541016966	5874910
		1	35 - 38	3322541016973	5874927
		2	38 - 41	3322541016980	5874933
		3	41 - 43	3322541016997	5874956
		4	43 - 48	3322541017000	5874962

MiGeL: 22.12.02.00.1



CERVICALSTÜTZEN C3 RIGID MIT KINNSTÜTZE

RELATIVE RUHIGSTELLUNG / BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule Linderung verschaffen kann:
- Behandlung von Traumatpatienten.
 - Mittelschwere zervikale Läsionen
 - Andere Pathologien, die eine Ruhigstellung der Halswirbelsäule erfordern.

DIE VORTEILE

- Höhenverstellbar zwischen 8,5 und 12 cm.
- Schränkt den Bewegungsradius der Halswirbelsäule ein.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang am Halsansatz in cm	GTIN	PHARMACODE
6606	Weiss	0	32 - 35	3322541017017	5874979
		1	35 - 38	3322541017024	5874985
		2	38 - 41	3322541017031	5874991
		3	41 - 43	3322541017048	5875016
		4	43 - 48	3322541017055	5875022

MiGeL: 22.12.02.00.1

ENTSCHEIDUNGSBAUM SCHULTER

— WELCHE SITUATION? —

AKUT - DRINGEND

— WELCHES ZIEL? —

STÜTZUNG DER SCHULTERN
DURCH RETROPULSION

RELATIVE
RUHIGSTELLUNG

— DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD —



**SCHLÜSSELBEIN-
BANDAGE**



ARM-SCHULTER-BANDAGE

— INDIKATIONEN —

Schlüsselbeinfraktur und Schlüsselbeinluxation

Abheilen • Verletzungen von weichem Gewebe
• Instabilität • Schultertrauma

CHRONISCH - PRÄVENTIV

STÜTZUNG

WÄRMUNG



ARMSCHLINGE
MIT TASCHE



ARMSCHLINGE



SCHULTERWÄRMER
CHALEUR

Nach einem Trauma
• Vor/nach einem chirurgischen Eingriff

Rheumatismus



SCHULTER

ARMSCHLINGE MIT TASCHE | S.18



ARM-SCHULTER-BANDAGE EINHEITSGRÖSSE

RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden mit der Schulter, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks mit dem seitlich am Körper anliegenden Ellbogen insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Vor oder nach einem Eingriff.
- Abheilen/Verletzungen von weichem Gewebe.
- Instabilitäten/Verletzungen der Schulter.

VORTEIL

- Klettverschlüsse.



Art.-Nr.	Farbe	Einheitsgrösse (Umfang des Thorax unter der Brust + Oberarm max. 130 cm)	GTIN	PHARMACODE
6452	Schwarz	1	3322547811329	2637003

MiGeL: 22.09.01.00.1



ARM-SCHULTER-BANDAGE

RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden mit der Schulter, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Ruhigstellung des Schultergelenks mit seitlich am Körper anliegendem Ellbogen helfen kann:

- Instabilitäten/Verletzungen der Schulter.
- Vor oder nach einem operativen Eingriff.
- Abheilen/Überdehnung von weichem Gewebe.



Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Grösse* Umfang des Thorax unterhalb der Brust + Oberarm in cm	GTIN	PHARMACODE
4209	Schwarz	0	JUNIOR < 45	3322541008060	4791406
		1	JUNIOR 45 - 55	3322541008077	4791398
		2	55 - 75	3322541008084	4791381
		3	75 - 95	3322541008091	4791375
		4	95 - 115	3322541008107	4791369
		5	115 - 135	3322541008114	4791412

MiGeL: 22.09.01.00.1

* Wenn beim Messen das Ergebnis nahe an der nächsten Grösse liegt, empfehlen wir Ihnen die nächstgrössere Grösse zu wählen.



SCHLÜSSELBEINBANDAGE

HALT

INDIKATIONEN

Beschwerden am Brustkorb, bei denen eine retropul-sive Schulterhaltung insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Frakturen und Luxationen des Schlüsselbeins.
- Probleme mit der Körperhaltung.

DIE VORTEILE

- Einfaches Anlegen: Verstellung durch Schiebeschnalle.
- Fördert die korrekte Haltung.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Brustumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
4222	Schwarz	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995	4791607
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008	4791599
		2	65 - 75	3322541008015	4791582
		3	75 - 85	3322541008022	4791576
		4	85 - 100	3322541008039	4791524
		5	100 - 115	3322541008046	4791518
		6	115 - 135	3322541008053	4791501

MiGel: 22.09.05.00.1



ARMSCHLINGE MIT TASCHE

STÜTZUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen eine Unterstützung des Arms insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Nach einer Verletzung sowie vor oder nach einem chirurgischen Eingriff.
- Unterstützung eines Gipsverbands oder einer Schiene.

DIE VORTEILE

- Verstellung durch Schiebeschnalle.
- Stützt den Arm.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
6507	Schwarz	00 JUNIOR	< 45	3322541008411	5922477
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030	5922454
		1	60 - 80	3322546048078	5922460
		2	80 - 100	3322546048146	5922448
		3	100 - 120	3322546048221	5922431
		4	120 - 140	3322541008428	5922483

MiGel: 05.10.03.00.1



ARMSCHLINGE

STÜTZUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen eine Unterstützung des Arms insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:
- Nach einer Verletzung sowie vor oder nach einem chirurgischen Eingriff.
 - Unterstützung eines Gipsverbands oder einer Schiene.

DIE VORTEILE

- Stützt den Arm.
- Einstellbar.

Art.-Nr.	Farbe	Einheitsgrösse	GTIN	PHARMACODE
6612	Schwarz	1	3322541022868	6041543

MiGeL: 05.10.02.00.1



SCHULTERWÄRMER CHALEUR

BEWAHRT DIE WÄRME

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen die adiathermische Eigenschaften der Wolle helfen können, insbesondere in den folgenden Fällen:
- Rheumatische Beschwerden.

DIE VORTEILE

- Merinowolle, die die Wärme auf natürliche Weise hält.
- Natürliche Modal®-Faser macht das Gewebe noch weicher und luftdurchlässig.



Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Abstand Schulter zu Schulter in cm	GTIN	PHARMACODE
4298	Anthrazit	S	35 - 45	3322541067562	7809779
		M	45 - 55	3322541067579	7809780
		L	55 - 65	3322541067586	7809781

 Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne

ENTSCHEIDUNGSBAUM RÜCKEN

— WELCHE SITUATION? —

CHRONISCH - PRÄVENTION (ODER IN AKUTPHASEN)

— WELCHES ZIEL? —

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG
(LENDENWIRBELSTÜTZE)

Bei langem Stehen oder Sitzen,
direkt auf der Haut zu tragen

Als Einfachstützgurt:
Bei längerem Stehen oder Sitzen
Als Doppelstützgurt:
Bei Tätigkeiten, die eine stärkere
Stützung erfordern

— DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD —



SEITE
23

LOMBOGIB®
FINESSE




SEITE
26

LOMBOGIB®
PROGRESSIV

— INDIKATIONEN —

- Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago)
- Ischias
- Verletzungen der LWS
- Chronische Schmerzen im unteren Rücken

CHRONISCH - PRÄVENTION (ODER IN AKUTPHASEN)

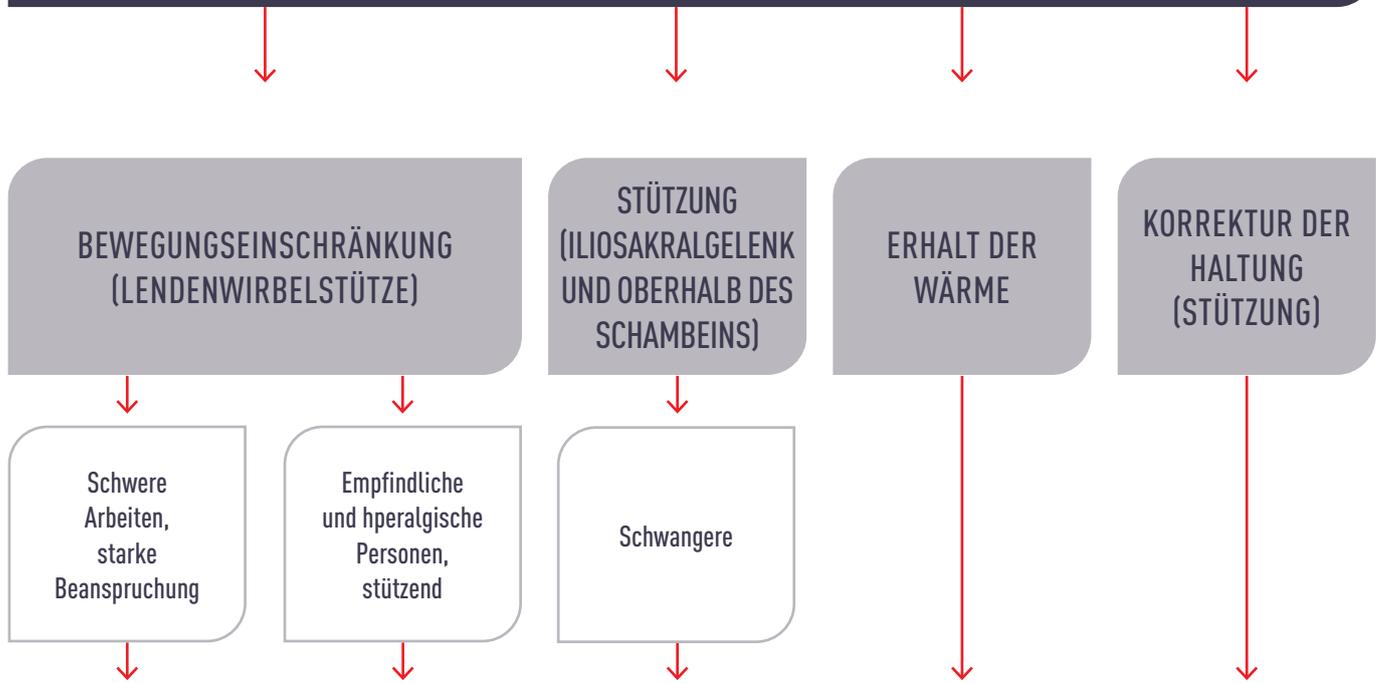



RÜCKEN

LOMBOGIB® FINESSE | S.23

DIE KÖRPERHALTUNG UNTERSTÜTZEN

BEI LANGEM SITZEN ODER STEHEN
& HYPERLORDOSIERTE PATIENTEN

GIBAUD® LINDERT SCHMERZEN

Entdecken Sie den Gurt, der Rückenschmerzen vorbeugt und lindert und Sie bequem durch den Alltag begleitet.



DAS ANLEGEN IM
VIDEO



LOMBOGIB® FINESSE

PATENTIERT



LEICHTES
GEWEBE



PATENTIERTE
V-FÖRMIG
ANGEORDNETE
STREBEN

STÜTZUNG


INDIKATIONEN

Beschwerden der Lendenwirbelsäule, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung Linderung verschaffen kann:

- Muskelschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago).
- Ischias.
- Lumbosakrale Läsionen.
- Chronische Schmerzen im Lendenwirbelbereich.

DIE VORTEILE

- Patentiertes einlagiges Aeralis®-Gewebe, sehr weich und atmungsaktiv.
- Patentierte, ergonomisch geformte Fingerschlaufen.
- Kann auf oder unter der Kleidung getragen werden.

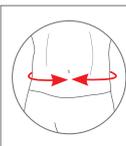

TAILLENUMFANG

Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

B

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6748	Blau	0	66 - 80	3322541073600	1098542
			1	80 - 90	3322541073617	1098543
			2	90 - 100	3322541073624	1098545
			3	100 - 110	3322541073631	1098546
			4	110 - 125	3322541073648	1098547
			5	125 - 140	3322541073655	1098548

MiGeL: 22.14.02.00.1

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
21 cm	6749	Blau	0	66 - 80	3322541073662	1098549
			1	80 - 90	3322541073679	1098551
			2	90 - 100	3322541073686	1098552
			3	100 - 110	3322541073693	1098553
			4	110 - 125	3322541073709	1098554
			5	125 - 140	3322541073716	1098555

MiGeL: 22.14.02.00.1

UNTERSTÜTZUNG BEIM TRAGEN VON LASTEN

UND/ODER BEI (AKUTEN ODER CHRONISCHEN) HYPERALGESIEN & PATIENTEN MIT HYPERLORDOS

DAS ANLEGEN IM VIDEO



GIBAUD GEWÄHRLEISTET EINE KORREKTE HALTUNG

Entdecken Sie den Lendengürt, der Ihren Bewegungen Halt gibt und Rückenschmerzen lindert.



LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

PATENTIERT



PATENTIERTE V-FÖRMIG ANGEORDNETE STREBEN



PATENTIERTE FINGERSCHLAUFEN



DOPPELZUG

STÜTZUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden der Lendenwirbelsäule, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung Linderung verschaffen kann:

- Muskelschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago).
- Ischias.
- Lumbosakrale Läsionen.
- Chronische Schmerzen im Lendenwirbelbereich.

DIE VORTEILE

- Patentierte hohe, gepolsterte Rückenstütze.
- Rückenstütze abnehmbar bei Patienten mit geringer Lordose.
- Doppelzug: breite doppelte Gurtbänder zur Anpassung der Spannung entsprechend der Aktivität und dem Schmerz
- Patentierte ergonomische Fingerschlaufen.



TAILLENUMFANG

Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

B

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6658	Blau	0	70 - 80	3322541035363	6665829
			1	80 - 90	3322541035370	6665835
			2	90 - 100	3322541035387	6665841
			3	100 - 110	3322541035394	6665858
			4	110 - 125	3322541035400	6665864
			5	125 - 140	3322541035417	6665870

MiGel: 22.14.02.00.1

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
21 cm	6667	Blau	0	70 - 80	3322541038029	7000368
			1	80 - 90	3322541038036	7000374
			2	90 - 100	3322541038043	7000380
			3	100 - 110	3322541038050	7000397
			4	110 - 125	3322541038067	7000405
			5	125 - 140	3322541038074	7000411

MiGel: 22.14.02.00.1

UNTERSTÜTZUNG BEIM TRAGEN VON LASTEN


UND/ODER (AKUT ODER CHRONISCH)
HYPERALGETISCHER PATIENT
& PATIENTEN MIT FEHLENDER KRAFT

GIBAUD GEWÄHRLEISTET EINE KORREKTE HALTUNG

Entdecken Sie den Lendengürt, der Ihren Bewegungen Halt gibt und Rückenschmerzen lindert.



DAS ANLEGEN IM VIDEO

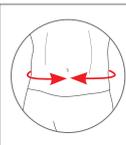

TAILLENUMFANG
Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

B

PATENTIERT



LOMBOGIB® EVOLUTION

STÜTZUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden der Lendenwirbelsäule, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung Linderung verschaffen kann:

- Muskelschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago).
- Ischias.
- Lumbosakrale Läsionen.
- Chronische Schmerzen im Lendenwirbelbereich.

DIE VORTEILE

- Leichtes Anlegen durch Spannkraftübersetzung (x4).
- Anpassbarer Gurt: nach Bedarf abnehmbare Rückenstütze.
- Lumbosakral-Verstärkung, zur Stabilisierung auf dem Beckenkamm ruhend.
- Patentierte ergonomische Fingerschlaufen.

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6661	Blau	0	70 - 80	3322541035547	6953184
			1	80 - 90	3322541035554	6953190
			2	90 - 100	3322541035561	6953209
			3	100 - 110	3322541035578	6953215
			4	110 - 125	3322541035585	6953221
			5	125 - 140	3322541035592	6953238

MiGel: 22.14.02.00.1

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
21 cm	6670	Blau	0	70 - 80	3322541038142	7000204
			1	80 - 90	3322541038159	7000210
			2	90 - 100	3322541038166	7000227
			3	100 - 110	3322541038173	7000233
			4	110 - 125	3322541038180	7000256
			5	125 - 140	3322541038197	7000262

MiGel: 22.14.02.00.1



Verstellbare Doppelstützgurt mit Sicherheitsverschluss.

PATENTIERT



LOMBOGIB® PROGRESSIV

ALS EINFACHSTÜTZGURT: BEI LÄNGEREM STEHEN ODER SITZEN
ALS DOPPELSTÜTZGURT: BEI TÄTIGKEITEN, DIE EINE STÄRKERE STÜTZUNG ERFORDERN


INDIKATIONEN

Zur Bewegungseinschränkung bei Rückenverletzungen vor allem in den folgenden Fällen:

- Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich (Lumbago);
- Ischias.
- Verletzungen an der LWS;
- Chronische Schmerzen im unteren Rücken.

DIE VORTEILE

- Patentierte V-förmig angeordnete Stäbe.
- Weicher, durchbrochener Stoff.
- Höhenverstellbarer, abnehmbarer Doppelstützgurt zur Anpassung an die jeweilige Tätigkeit.
- Doppelstützgurt mit Sicherheitsverschluss.

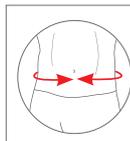

TAILLENUMFANG
Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

B

DAS ANLEGEN IM VIDEO



Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6744	Blau	0	66 - 80	3322541073365	1098556
			1	80 - 90	3322541073372	1098557
			2	90 - 100	3322541073389	1098558
			3	100 - 110	3322541073396	1098559
			4	110 - 125	3322541073402	1098560
			5	125 - 140	3322541073419	1098561

MiGeL: 22.14.01.00.1

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
21 cm	6745	Blau	0	66 - 80	3322541073426	1098562
			1	80 - 90	3322541073433	1098563
			2	90 - 100	3322541073440	1098564
			3	100 - 110	3322541073457	1098565
			4	110 - 125	3322541073464	1098566
			5	125 - 140	3322541073471	1098567

MiGeL: 22.14.01.00.1



RÜCKEN-GERADEHALTER



BISS DIE HALTUNG & LINDERT RÜCKENSCHMERZEN

INDIKATIONEN

Bei Thorax-Beschwerden, die insbesondere in folgenden Fällen durch eine Korrektur der Haltung gelindert werden können:

- Haltungsschwächen.
- Rückenschmerzen.

DIE VORTEILE

- Leichtes Anlegen durch Schlaufen-system.
- Verbessert die Körperhaltung und die posturale Kontrolle.



UMFANG DES THORAX
Mann: Den Umfang des Brustkorbs über den Brustwarzen (ohne Arme) messen.
Frau: Den Umfang des Brustkorbs unterhalb der Brust (ohne Arme) messen.

E

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
6611	Schwarz	0 JUNIOR	40 - 60	3322541022820	6041508
		1 JUNIOR	60 - 80	3322541022837	6041514
		2	80 - 100	3322541022844	6041520
		3	100 - 120	3322541022851	6041537

MiGeL: 22.09.05.00.1

DEN RÜCKEN WERDENDER MÜTTER STÜTZEN

GIBAUD® STÜTZT IHRE LENDENWIRBEL

Entdecken Sie den leichten, anpassbaren Gurt zur Unterstützung Ihres Rückens und Linderung von schwangerschaftsbedingten Lumbalgien während der gesamten Schwangerschaft.



DAS ANLEGEN IM VIDEO



LOMBOGIB® MATERNITY

PATENTIERT



ANPASSBAR AN DIE ENTWICKLUNG DER SCHWANGERSCHAFT



PATENTIERTES EINLAGIGES AERALIS®-GEWEBE

UNTERSTÜTZUNG DES RÜCKENS SCHWANGERER FRAUEN

INDIKATIONEN

Zur Stützung des Iliosakralgelenks und oberhalb des Schambeins vor allem in den folgenden Fällen:

- Schwangerschaftsbedingte Rückenschmerzen.

DIE VORTEILE

- Stützt und lindert schwangerschaftsbedingte Schmerzen im Lendenwirbelbereich.
- Spezielle Bänder gegen Beckenantversion (Hyperlordose).
- Weiches, atmungsaktives, einlagiges Aeralis® Gewebe.
- Stützkissen entnehmbar, zur Anpassung an die Entwicklung der Lordose während der Schwangerschaft.
- 2 Streifen, mit dehnbarer Seitenpartie, an Schwangerschaftsverlauf anpassbar, stützen den Bauch, ohne einzuengen.



TAILLEUMFANG
Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

B

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Tailleumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6653	Blau	1	80 - 135	3322541033482	6622659

MiGeL: 22.14.02.00.1

DER CHALEUR NIERENWÄRMER IST EIN NICHTINVASIVES, NATÜRLICHES UND NACHHALTIGES MEDIZINPRODUKT



NIERENWÄRMER CHALEUR



HÄLT DIE WÄRME & LINDERT RÜCKENSCHMERZEN

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, bei denen die adiathermischen Eigenschaften der Wolle insbesondere in den folgenden Fällen helfen können:

- Schmerzen im unteren Rückenbereich.

DIE VORTEILE

- Wolle, die die Körperwärme auf natürliche Weise hält.
- Natürliche Modal®-Faser macht das Gewebe noch weicher und luftdurchlässig.



TAILLENUMFANG

Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

B

Weich, luftdurchlässig und bequem

Der Gibaud-Thermogürtel lindert Rückenschmerzen, indem er den Körper umhüllt und seine Wärme bewahrt. Ein weicher, luftdurchlässiger und bequemer Thermo-Gürtel aus Merinowolle und Modal®-Faser.

 Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
25 cm	4292	Anthrazit	S	61 - 75	3322541067326	7809767
			M	75 - 90	3322541067333	7809768
			L	90 - 105	3322541067340	7809769
			XL	105 - 120	3322541067357	7809770
30 cm	4297	Anthrazit	M	75 - 90	3322541067524	7809775
			L	90 - 105	3322541067531	7809776
			XL	105 - 120	3322541067548	7809777
			XXL	120 - 140	3322541067555	7809778
25 cm	4293	Ecrû	S	61 - 75	3322541067364	7809771
			M	75 - 90	3322541067371	7809772
			L	90 - 105	3322541067388	7809773
			XL	105 - 120	3322541067395	7809774

GIBAUD

DAS GEHEIMNIS EINER UNAUFFÄLLIGEN
STÜTZE VON MORGENS BIS ABENDS



LOMBOGIB® FINESSE

Die Lendenstütze, die so unauffällig
ist dass Sie sie vergessen werden!

WWW.GIBAUD.CH

Die LOMBOGIB® FINESSE 21 cm und 26 cm helfen Ihnen, eine gute Rückenhaltung zu bewahren, und unterstützen den Rücken bei alltäglichen Bewegungen. Sie sind bei Erkrankungen der Lendenwirbelsäule indiziert, die von einer Bewegungseinschränkung profitieren können, insbesondere in folgenden Fällen: Schmerzen in der Lendenmuskulatur (Lumbago); Ischias; lumbosakrale Läsionen; chronische Schmerzen im unteren Rücken. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.
GIBAUD (Suisse) SA : Rue Gourgas 23 - 1205 Genf - Tel. 022 328 06 00 - Fax 022 328 02 74 - E-Mail gibaudsuisse@gibaud.com - www.gibaud.ch

Ein
Unternehmen
der Innothera-
Gruppe



RIPPENGURT | S.32

ABDOMEN / THORAX

ENTSCHEIDUNGSBAUM ABDOMEN / THORAX

– WELCHE SITUATION? –

CHRONISCH - PRÄVENTION
(ODER IN AKUTPHASEN)

**AKUT /
NOTFALL**

– WELCHES ZIEL? –

BEWEGUNGS-
EINSCHRÄNKUNG
(STÜTZUNG)

KOMPRESSION &
STÜTZUNG

HALT

KOMPRESSION &
STÜTZUNG

– DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD –



**ABDOMINAL-
STÜTZGURT**



**BAUCHGURT
ELASTISCH**



**LEISTEN-
BRUCHBAND**



RIPPENGURT

– INDIKATIONEN –

Zerrungen der Bauchmuskeln oder
fragiler Bauchbereich

Ein- oder beidseitige
Leistenbrüche
• Zum Anlegen vor oder nach
einem operativen Eingriff

Rippenfraktur und
Rippenverletzung



ABDOMINALSTÜTZGURT

STÜTZUNG

INDIKATIONEN

Ohne Rückenstütze: Abdominale Beschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression helfen kann:

- Dehnung der Bauchmuskeln oder Schwäche im Bauchbereich.

Mit Rückenstütze: Abdominale Beschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression und Bewegungseinschränkung helfen kann:

- Dehnung der Bauchmuskeln oder Schwäche im Bauchbereich (Wochenbett, postoperativ) verbunden mit: Ischias, Lumbago / Schmerzen im unteren Rückenbereich.

DIE VORTEILE

- Klettverschluss.
- Verstellbare Abdominal-Verstärkung.
- Abdomen- und Lumbalbereich getrennt verstellbar.



TAILLENUMFANG

Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

B

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
25 cm	6364	Weiss	1	78 - 88	3322547076117	1572690
			2	88 - 98	3322547076124	1572709
			3	98 - 108	3322547076131	1572715
			4	108 - 118	3322547076148	1572721
			5	118 - 128	3322547295495	1887637

MiGeL: 05.11.10.00.1



BAUCHGURT ELASTISCH

HALT

INDIKATIONEN

Abdominale Beschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression helfen kann:

- Dehnung der Bauchmuskeln oder Schwäche im Bauchbereich.

DIE VORTEILE

- Verstellbarer Klettverschluss.
- Drei elastische Bänder.
- Lindert Schmerzen.



TAILLENUMFANG

Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

B

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
24 cm	6193	Weiss	1	61 - 75	3322546363188	1184657
			2	76 - 90	3322546363195	1184663
			3	91 - 105	3322546363201	1185237
			4	106 - 120	3322546363218	1184686
			5	121 - 135	3322547295440	1887620

MiGeL: 05.11.10.00.1



LEISTENBRUCHBAND

HALT

INDIKATIONEN

Einseitige oder beidseitige reponible Leistenhernie, post- und/oder prä-operatives Tragen.

DIE VORTEILE

- Anatomisch geformte Pelotten.
- Abnehmbare Schenkelriemen zur einseitigen

- Verwendung.
- Plastikschnallen.
 - Kleine Pelotten 10,5 x 6 cm.
 - Unisex-Produkt.



TAILLENUMFANG
Den Umfang der Taille 2 cm oberhalb der Beckenkämme messen. Das Massband darf nicht zu straff angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass die Person normal atmet und den Bauch nicht einzieht. Die Person muss beim Messen aufrecht stehen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Taillenumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
6089	Weiss	1	76 - 89	3322546301968	1158625
		2	89 - 104	3322546301975	1083324
		3	104 - 117	3322546301982	1158631



RIPPENGURT

STÜTZUNG

INDIKATIONEN

Bei Beschwerden, die insbesondere in folgenden Fällen durch eine Unterstützung im Thoraxbereich gelindert werden können:

- Rippenfraktur.
- Rippentrauma.

DIE VORTEILE

- 3 elastische Bänder.
- Klettverschluss.
- Lindert Schmerzen.

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
24 cm	6098	Weiss	1	70 - 100	3322546330432	1158708
			2	100 - 130	3322546330449	1158714

Männer - MiGel: 05.13.02.00.1

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
24 cm	6085	Weiss	1	70 - 95	3322546196755	1449825
			2	95 - 120	3322546196762	1449831

Frauen - MiGel: 05.13.02.00.1



UMFANG DES THORAX
Mann: Den Umfang des Brustkorbs über den Brustwarzen (ohne Arme) messen.
Frau: Den Umfang des Brustkorbs unterhalb der Brust (ohne Arme) messen.

PRODUKTE FÜR DIE **HAND**

— WELCHE SITUATION? —

AKUT - DRINGEND

TRAUMATOLOGIE



— WELCHES ZIEL? —



— DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD —




— INDIKATIONEN —



CHRONISCH - PRÄVENTIV


RHEUMATOLOGIE

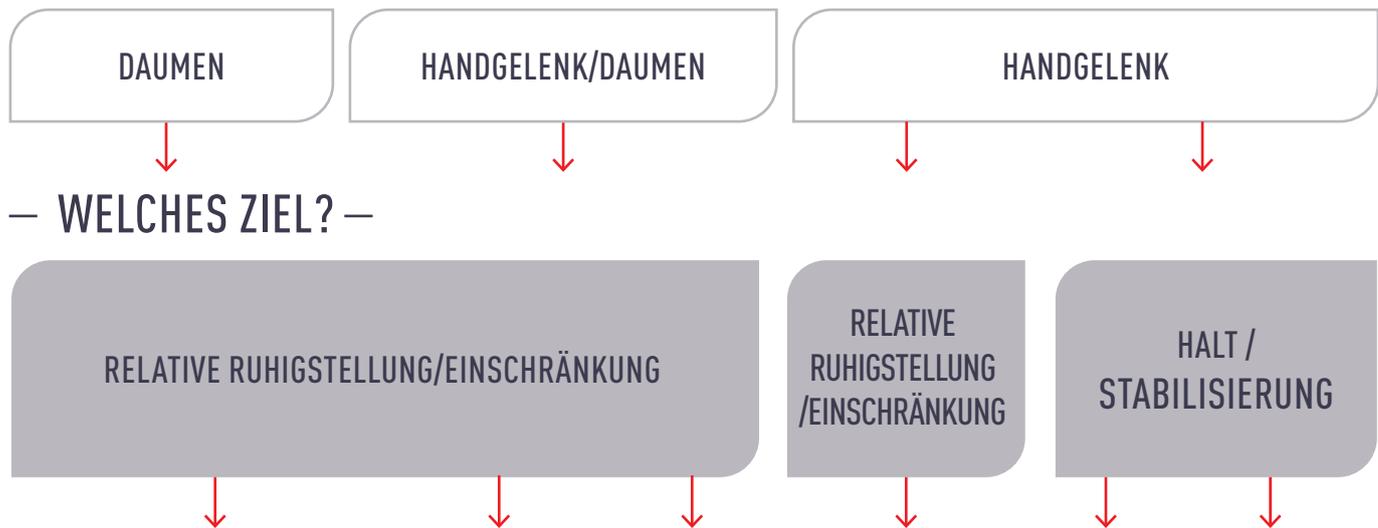

RHIZARTHROSE-PROTOKOLL



— INDIKATIONEN —

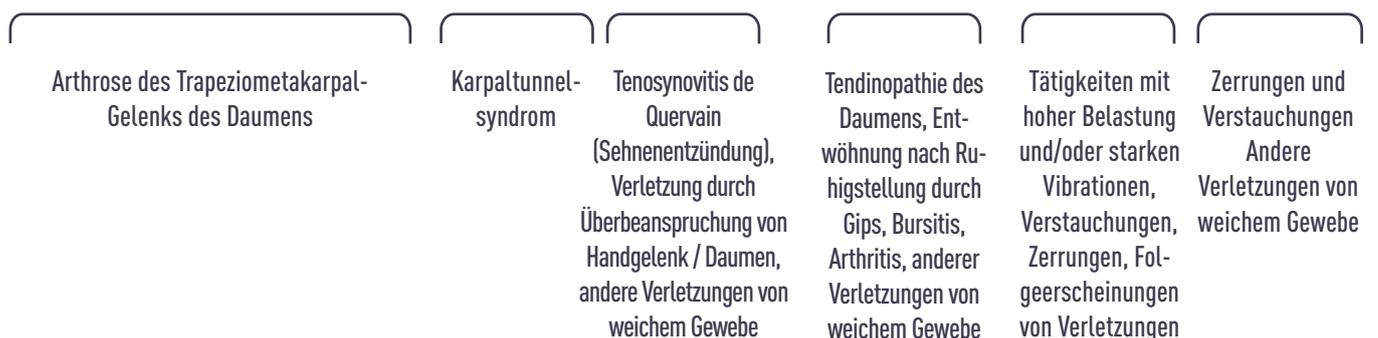

MANUGIB® RHIZARTHROSE FUNKTION | S.39



HAND



MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK



BREITE, ANPASSBARE
HANDFLÄCHENSCHIENE



3
BEFESTIGUNGSRIEMEN

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung des Handgelenks Linderung verschaffen kann:
- Leichte bis mittelschwere Verstauchungen und Zerrungen.
 - Bursitis.
 - Entwöhnung nach Gipsverband.
 - Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

DIE VORTEILE

- Breite, anpassbare Handflächenschiene
- 3 Zuggurte.
- Vollständige Bewegungsfreiheit der Finger.



6
UMFANG DES
HANDGELENKS
Den Umfang des
Handgelenks unterhalb des
Griffelfortsatzes messen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6508	Schwarz	0D JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
		1D	14 - 16	3322544747904	5936841
		2D	17 - 19	3322544747911	5936864
		3D	20 - 22	3322544747928	5936887
		0G JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311
		1G	14 - 16	3322544747935	5936858
		2G	17 - 19	3322544747942	5936870
		3G	20 - 22	3322544747959	5936893

MiGel: 22.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK LANG



EINSCHRÄNKUNG DER
BEWEGUNGEN DES
HANDGELENKS



FLEXIBLE SCHIENE

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung des Handgelenks Linderung verschaffen kann:
- Leichte bis schwere Verstauchungen und Zerrungen.
 - Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips.
 - Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen.
- 4 Zuggurte.
- Anatomisch geformte palmare Schiene.
- Breite, gepolsterte, flexible Schiene.



6
UMFANG DES
HANDGELENKS
Den Umfang des
Handgelenks unterhalb des
Griffelfortsatzes messen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6649	Blau	0D JUNIOR	10-14	3322541028976	6623966
		1D	14-18	3322541028990	6623989
		2D	18-22	3322541029010	6624003
		0G JUNIOR	10-14	3322541028983	6623972
		1G	14-18	3322541029003	6623995
		2G	18-22	3322541029027	6624026

MiGel: 22.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK DAUMEN



EINSCHRÄNKUNG DER
BEWEGUNGEN DES
HANDGELENKS



FLEXIBLE SCHIENE

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung des Handgelenks und des Daumens Linderung verschaffen kann:
- Trauma im Bereich Handgelenk / Daumen.
 - Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips.
 - Postoperative Verwendung.
 - Skifahrer-Daumen.
 - Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen.
- Schränkt die Bewegungen von Handgelenk und Daumen ein.
- 4 Zuggurte.
- Abnehmbare, flexible Schienen.



6
UMFANG DES
HANDGELENKS
Den Umfang des
Handgelenks unterhalb des
Griffelfortsatzes messen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6650	Blau	0D JUNIOR	10-14	3322541029034	6623883
		1D	14-18	3322541029058	6623914
		2D	18-22	3322541029072	6623937
		0G JUNIOR	10-14	3322541029041	6623908
		1G	14-18	3322541029065	6623920
		2G	18-22	3322541029089	6623943

MiGel: 22.07.03.00.1



RUHIGSTELLUNG
DER LANGEN
FINGER



Intrinsische
Position

FINGER- HANDGELENK-SCHIENE

RELATIVE RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

Verletzung der langen Finger, bei der eine Ruhigstellung insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Verstauchung.
- Luxation.
- Zerrung.
- Stabile Frakturen.

DIE VORTEILE

- Anpassung der Schiene nach ärztlicher Anweisung.
- Dorsale oder palmare Positionierung möglich entsprechend der Lokalisation der Verletzung.
- Ruhigstellung in Syndaktilie: 2. Finger mit dem 3. Finger und 4. Finger mit dem 3. Finger.



LÄNGE DER HAND
Die Länge zwischen dem Handgelenk und der Spitze des verletzten Fingers messen.

H

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Länge zwischen der Spitze des verletzten Fingers und dem Handgelenk in cm	GTIN	PHARMACODE
6610	Schwarz	1	<13	3322541022721	5987732
		2	13 - 17	3322541022738	5987749
		3	17 - 20	3322541022745	5987755
		4	20 - 23	3322541022752	5987761

MiGel: 22.06.04.00.1



MANUGIB® HAND-SEHNENENTZÜNDUNG



EINSCHRÄNKUNG DER
BEWEGUNGEN DES
HANDGELENKS



FLEXIBLE SCHIENE

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung des Handgelenks helfen kann:

- Tendinopathie des Handgelenks.
- Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips.
- Bursitis.
- Arthritis.
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen.
- Einschränkung der Bewegungen des Handgelenks
- Einzigartige Verstelllasche.



UMFANG DES HANDGELENKS
Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen.

G

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6686	Blau	1D	13,5 - 15,5	3322541040121	7207187
		2D	15,5 - 18	3322541040145	7207201
		3D	18 - 21	3322541040169	7207224
		1G	13,5 - 15,5	3322541040138	7207193
		2G	15,5 - 18	3322541040152	7207218
		3G	18 - 21	3322541040176	7207230

MiGel: 22.07.01.00.1



MANUGIB® DAUMEN-SEHNENENTZÜNDUNG



BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung des Handgelenks und des Daumens helfen kann:
- Tenosynovitis de Quervain*
 - Verletzung durch Überbeanspruchung von Handgelenk / Daumen.
 - Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

* Tendinite du pouce

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen.
- Seitliche Schiene gibt dem Daumensattelgelenk Halt.
- Verstellaschen (Handgelenk und Daumen).



6
UMFANG DES HANDGELENKS
Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen.

Art-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6685	Blau	1D	13,5 - 15,5	3322541040060	7207247
		2D	15,5 - 18	3322541040084	7207276
		3D	18 - 21	3322541040107	7207299
		1G	13,5 - 15,5	3322541040077	7207253
		2G	15,5 - 18	3322541040091	7207282
		3G	18 - 21	3322541040114	7207307

MiGel: 22.07.01.00.1



MANUGIB® RHIZARTHROSE FUNKTION



STABILISIERUNG

INDIKATION

Arthrose des Trapeziometakarpal-Gelenks des Daumens.

DIE VORTEILE

- Stabilisierung des Daumens bis zum Handgelenk zum Erhalt der Greiffähigkeiten bei gleichzeitiger Schmerzlinderung.
- Verstellaschen (Daumen und Handgelenk).
- Futter aus Fleece-Mesh.



6
UMFANG DES HANDGELENKS
Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen.

Art-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6683	Blau	1D	13,5 - 15,5	3322541039941	7207388
		2D	15,5 - 18	3322541039965	7207402
		3D	18 - 21	3322541039989	7207425
		1G	13,5 - 15,5	3322541039958	7207394
		2G	15,5 - 18	3322541039972	7207419
		3G	18 - 21	3322541039996	7207431

MiGel: 22.06.05.00.1



Mit Fingerpalette



Ohne Fingerpalette



6
UMFANG DES HANDGELENKS
 Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen.

MANUGIB® KARPALTUNNEL

PATENTIERT



TRAGEN TAG &
 NACHT



LINDERT
 SCHMERZEN

LINDERT SCHMERZEN

INDIKATION

Karpaltunnelsyndrom.




3 ERSTE FINGER
 Nächtliches Kribbeln

DIE VORTEILE

- Handgelenk-Hand-Winkel, Referenzposition gerade einstellbar zwischen +20° und -20°.
- Abnehmbare und anpassbare Fingerpalette.
- Antirutschpolster.
- Komplett offen im Bereich des Karpaltunnels (keine Druckzone).

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6603	Grau	1D	<14	3322541016423	5725073
		2D	14 - 16	3322541016447	5725104
		3D	17 - 20	3322541016461	5725127
		4D	21 - 24	3322541017628	5933819
		1G	<14	3322541016430	5725096
		2G	14 - 16	3322541016454	5725110
		3G	17 - 20	3322541016478	5725133
		4G	21 - 24	3322541017635	5933825

MiGeL: 22.07.04.00.1

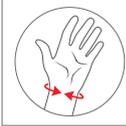

6
UMFANG DES HANDGELENKS
 Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen.

HANDGELENK-DAUMEN- BANDAGE



STREBEN AUS
 STAHL



KOMPRESSIONS-
 GEWEBE

KOMPRESSION & HALT

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Kompression und/oder ein Halten des Handgelenks und des Daumens Linderung verschaffen kann:
- Zerrung.
 - Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

DIE VORTEILE

- Das Produkt ermöglicht eine Kompression des Handgelenks.
- Die Stahlstrebe bietet Handgelenk und Daumen Halt.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
5005	Schwarz	1	14 - 15	3322544685046	3532795
		2	16 - 17	3322544685053	3534162
		3	18 - 19	3322544685060	3534156
		4	19 - 21	3322544685077	3534133

MiGeL: 05.07.01.00.1



KRAFTARMBAND



GIBT EINEM GESCHWÄCHTEN HANDGELENK HALT UND STABILISIERT ES.


INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen das Halten und die Stabilisierung des Handgelenks Linderung verschaffen kann:

- Tätigkeiten mit hoher Belastung und/oder starken Vibrationen.
- Verstauchung.
- Zerrung.
- Folgeschäden nach Verletzungen.

DIE VORTEILE

- Mit dem Klettverschluss kann die Spannung des Kraftarmbands individuell angepasst werden, um einen festen, aber bequemen Halt zu gewährleisten.
- Die Polsterung erhöht den Tragekomfort und schützt Ihr Handgelenk.

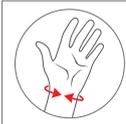

6
UMFANG DES HANDGELENKS
Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6420	Schwarz	1	14 - 16	3322547920083	2766284
		2	17 - 19	3322547920090	2766290
		3	20 - 22	3322547920106	2766309

MiGel: 05.07.12.00.1



STÜTZARMBAND



KOMPRESION DES HANDGELENKS

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Kompression des Handgelenks Linderung verschaffen kann:

- Zerrung.
- Verstauchung.
- Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

VORTEIL

- Das Produkt ermöglicht eine Kompression des Handgelenks.



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne



6
UMFANG DES HANDGELENKS
Den Umfang des Handgelenks unterhalb des Griffelfortsatzes messen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
5033	Schwarz	1	13 - 15	3322541011428	5159372
		2	15 - 17	3322541011435	5159389
		3	17 - 19	3322541011442	5159395
		4	19 - 21	3322541011459	5159403

MiGel: 05.07.10.00.1

ELLBOGEN



ELLBOGENBANDAGE | S. 45

ENTSCHEIDUNGSBAUM ELLBOGEN

— WELCHE SITUATION? —

CHRONISCH - PRÄVENTIV
(ODER IN AKUTEN PHASEN)

— WELCHES ZIEL? —

STÜTZUNG

KOMPRESSION

— DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD —



ELBOWGIB®

SEITE
44



TENNISELBOW

SEITE
44



ELLBOGENBANDAGE

SEITE
45

— INDIKATIONEN —

Ellenbogenbeschwerden wie Epikondylitis

Mediale und laterale Epikondylitis
• Schmerzen und Schwellungen
des Ellbogens



PATENTIERT



ELBOWGIB®


Lindert Schmerzen im Ellbogen

INDIKATION

für Halsverletzungen wie z.B. Epikondylitis

DIE VORTEILE

- Die halbstarre Struktur mit patentierter doppelter Biegung vermeidet Abschnüren, und die beiden Kompressions-Pelotten aus rutschhemmenden Silikon tragen zur Schmerzlinderung bei.
- Der nicht dehnbare Gurt ermöglicht es, das Armband fest, aber doch bequem zu straffen.

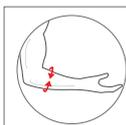

UMFANG DES UNTERARMS
Den Umfang des Unterarms unterhalb des Ellbogens messen.

N

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Unterarms unterhalb des Ellbogens in cm	GTIN	PHARMACODE
6478	Grau	1	22 - 26	3322544632026	3596708
		2	27 - 32	3322544632033	3596714
		3	33 - 38	3322544632057	3596720

MiGel: 22.08.06.00.1



TENNIS ELBOW

Lindert Schmerzen im Ellbogen

INDIKATION

Bei Beschwerden des Ellbogens wie Epikondylitis.

VORTEIL

- Die beiden Kompressionspelotten aus Schaumstoff sorgen für eine Linderung der Schmerzen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Einheitsgrösse	GTIN	PHARMACODE
5006	Schwarz			3322544685336	7829185

MiGel: 22.08.06.00.1



ELLBOGENBANDAGE



KOMPRESSION

INDIKATIONEN

Ellbogenbeschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression helfen kann:

- Mediale und laterale Epikondylitis.
- Schmerzen und Schwellungen des Ellbogens.
- Instabilität des Ellbogens.

DIE VORTEILE

- Dieses komprimierende 3D-Gewebe bewirkt durch Propriozeption* eine Wiederherstellung Ihrer Körperwahrnehmung.
- Das weiche und luftdurchlässige Gewebe fühlt sich an wie eine «zweite Haut», schützt Ihren Ellbogen und lässt die Haut atmen.

* Fähigkeit, die Position Ihres Körpers im Raum zu spüren.



UMFANG DES UNTERARMS
Den Umfang des Unterarms unterhalb des Ellbogens messen.

N



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne

Art-Nr.	Farbe	Grösse	Unterarm-Umfang in cm	GTIN	PHARMACODE
6728	Blau	1	22 - 24	3322541068354	7793688
		2	24 - 26	3322541068361	7793689
		3	26 - 28	3322541068378	7793690
		4	28 - 30	3322541068385	7793691
		5	30 - 32	3322541068392	7793692

MiGel: 05.08.06.00.1

ENTSCHEIDUNGSBAUM **KNIE**

— WELCHE SITUATION? —

CHRONISCH - SEKUNDÄRE PRÄVENTION
(RÜCKFALL)

KNIEARTHROSE

KNIEVERLETZUNGEN

— WELCHES ZIEL? —

WÄRMUNG,
WÄRMEERHALT

WÄRMUNG

PROPRIOZEPTIVE
KOMPRESSION

STÜTZUNG

— DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD —



DV4
KNIEBANDAGE



KNIEWÄRMER
CHALEUR



GENUGIB®
3D
PATELLA-
KNIEBANDAGE



**KNIE-
SPANGE**

— INDIKATIONEN —

Arthrosis

Patella-Tendinopathie

- Arthrosis
- Chondromalacie
- Knieschmerzen
- Eindruck / Gefühl von Instabilität

Patella-Tendinopathie

- Gelenkinstabilität

CHRONISCH - SEKUNDÄRE PRÄVENTION (RÜCKFALL)

BÄNDERVERLETZUNGEN

STABILISIERUNG (HALT)

PROPRIOZEPTIVE
KOMPRESSION



SEITE
53

GENUGIB®
STAB



SEITE
53

GENUGIB®
OPEN



SEITE
54

GENUGIB®
3D MIT
GELENK



SEITE
55

GENUGIB®
3D
BÄNDER
KNEIBANDAGE



SEITE
55

GENUGIB®
3D

Zerrung und leichte bis mittelschwere mediale/laterale Instabilität

Leichte Zerrung
• Eindruck/
Gefühl von
Instabilität
• Knieschmerzen
• Chondromalacie

Verstauchungen und
leichte Zerrungen
• Eindruck von
Instabilität
• Knieschmerzen

ENTSCHEIDUNGSBAUM **KNIE**

— WELCHE SITUATION? —

CHRONISCH - SEKUNDÄRE PRÄVENTION
(RÜCKFALL)

KNIEARTHROSE

KNIEVERLETZUNGEN

— WELCHES ZIEL? —

STÜTZUNG UND
WÄRMUNG

WÄRMUNG

PROPRIOZEPTIVE
KOMPRESSION

LINDERT
SCHMERZEN

— DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD —



DV4
KNEIBANDAGE



KNIEWÄRMER
CHALEUR



GENUGIB®
3D
PATELLA-
KNEIBANDAGE



KNIE-SPANGE

— INDIKATIONEN —

Arthrosis

Patella-Tendinopathie

- Arthrosis
- Chondromalacie
- Knieschmerzen
- Eindruck / Gefühl von Instabilität

Patella-Tendinopathie

- Gelenkinstabilität

CHRONISCH - SEKUNDÄRE PRÄVENTION (RÜCKFALL)

BÄNDERVERLETZUNGEN

STABILISIERUNG (STÜTZUNG)

PROPRIOZEPTIVE
KOMPRESSION



SEITE
53

GENUGIB®
STAB



SEITE
53

GENUGIB®
OPEN



SEITE
54

GENUGIB®
3D MIT
GELENK



SEITE
55

GENUGIB®
3D
BÄNDER
Kniebandage



SEITE
56

GENUGIB®
3D

Zerrung und leichte bis mittelschwere mediale/laterale Instabilität

Leichte Zerrung

- Eindruck/
Gefühl von
Instabilität
- Knieschmerzen
- Chondromalacie

Verstauchungen und
leichte Zerrungen

- Eindruck von
Instabilität
- Knieschmerzen



KNIE

GENUGIB® 3D GELENK | S. 54



KNIESCHIENE 0° UNIVERSAL 3-TEILIG

RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen eine Ruhigstellung des Knies insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:
- Knieverletzungen.
 - Ruhigstellung im Notfall.
 - Prä-/postoperative Ruhigstellung des Knies.

DIE VORTEILE

- Gurt zur Vorpositionierung
- 3-teilige Schiene, in der Breite verstellbar.
- 4 halbrunde Zuggurte.
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade in cm	GTIN	PHARMACODE
6910	Schwarz	0 JUNIOR	30	3322541070531	7826024
		1	40	3322541070548	7826025
		2	50	3322541070555	7826026
		3	60	3322541070562	7826027
		4	70	3322541070579	7826028

MiGeL: 22.04.03.00.1



KNIESCHIENE 0°/20° STANDARD 1-TEILIG

STABILISIERUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen eine Ruhigstellung des Knies insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:
- Knieverletzungen.
 - Ruhigstellung im Notfall.
 - Prä-/postoperative Ruhigstellung des Knies.

DIE VORTEILE

- Gurt zur Vorpositionierung
- 4 halbrunde Zuggurte.
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an.
- Abnehmbare Seitenstreben für 0° oder 20° Flexion.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang 20 cm oberhalb der Kniescheibe (Patella) in cm	Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade in cm	GTIN	PHARMACODE
6911	Schwarz	0 JUNIOR	30-40	30	3322541070586	7826029
		1	45-55	50	3322541070593	7826030
		2	55-65	50	3322541070609	7826031
		3	45-55	60	3322541070616	7826032
		4	55-65	60	3322541070623	7826033

MiGeL: 22.04.03.00.1



GENUGIB® POLY-C



RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

Ruhigstellung nach einer Operation/einer Knieverletzung und/oder Steuerung der Bewegungsamplitude.

DIE VORTEILE

- Silikonstück zur Einbettung der Tuberositas Tibiae.
- Polyzentrische, verzahnte Gelenke mit Amplitudenverstellung.



FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Einheitsgrösse	GTIN	PHARMACODE
40 cm	6504	Schwarz		3322544706123	3595235
MiGel: 22.04.02.00.1					



GENUGIB® POST-OP



RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

Ruhigstellung nach einer Operation/einer Knieverletzung und/oder Steuerung der Bewegungsamplitude.

DIE VORTEILE

- Silikonstück zur Einbettung der Tuberositas Tibiae.
- Streben mit grossem Hebelarm.
- Polyzentrische, verzahnte Gelenke mit Amplitudenverstellung.



FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Einheitsgrösse	GTIN	PHARMACODE
50 cm	6498	Schwarz		3322544706130	3595241
MiGel: 22.04.02.00.1					



GENUGIB® ROM



STABILISIERUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen eine Ruhigstellung des Knies insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Verstauchungen und leichte bis mittelschwere Instabilitäten des vorderen oder hinteren Kreuzbands, des Kniegelenks.

DIE VORTEILE

- Polyzentrische, verzahnte Gelenke mit Amplitudenverstellung.
- Starre Seitenschienen.
- Patella-Aussparung mit 2 Patella-Pelotten aus Halbringen zur Zentrierung der Knie- cheibe.
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an.



UMFANG DES KNIES
Den Umfang des Knies (bei leicht gebeugter Haltung) in der Mitte der Knie- scheibe messen.

FLEXION	0°	45°	60°	75°	90°
EXTENSION	0°	10°	20°	30°	40°

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
6902	Blau	1	31 - 34	3322541070401	7826046
		2	34 - 37	3322541070418	7826047
		3	37 - 40	3322541070425	7826048
		4	40 - 43	3322541070432	7826049
		5	43 - 46	3322541070449	7826050
		6	46 - 50	3322541070456	7826051

MiGel: 22.04.02.00.1



Vorrichtungen zur Einstellung der Amplitude von Flexion und Extension



GENUGIB® OPEN



ANPASSUNG
DES SITZES
MIT 4 GURTEN



VERZAHNTE
POLYZENTRISCHE
GELENKE



UFTDURCHLÄSSIG

STABILISIERUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden des Knies, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Verstärkung der Stabilität helfen kann:

- Leichte bis mittelschwere mediale/laterale Verstauchung und Instabilität des Knies.

DIE VORTEILE

- Vorderseite ganz zu öffnen: für leichteres Anlegen und bessere Anpassung.
- Patella-Aussparung mit 2 Patella-Pelotten aus Halbringen zur Zentrierung der Kniescheibe.
- Polyzentrische verzahnte Gelenke.
- Starre Seitenschielen, abnehmbar und anpassbar.
- 4 Gurte für Halt und Gegenhalt.
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
6900	Blau	1	31 - 34	3322541070289	7826040
		2	34 - 37	3322541070296	7826041
		3	37 - 40	3322541070302	7826042
		4	40 - 43	3322541070319	7826043
		5	43 - 46	3322541070326	7826044
		6	46 - 50	3322541070333	7826045

MiGel: 05.04.13.00.1



GENUGIB® STAB



PATELLARING MIT
STABILISIERUNGSSCHIENE



VERZAHNTE
POLYZENTRISCHE
GELENKE



UFTDURCHLÄSSIG

STABILISIERUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden des Knies, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Verstärkung der Stabilität helfen kann:

- Leichte bis mittelschwere mediale/laterale Verstauchung und Instabilität des Knies.

DIE VORTEILE

- Patellaring mit Silikon-Stabilisierungsschiene.
- Polyzentrische verzahnte Gelenke.
- Starre Seitenschielen, abnehmbar und anpassbar.
- 4 Gurte für Halt und Gegenhalt.
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
6901	Blau	1	31 - 34	3322541070340	7826034
		2	34 - 37	3322541070357	7826035
		3	37 - 40	3322541070364	7826036
		4	40 - 43	3322541070371	7826037
		5	43 - 46	3322541070388	7826038
		6	46 - 50	3322541070395	7826039

MiGel: 05.04.13.00.1



GENUGIB® 3D MIT GELENK



ANPASSUNG
DES SITZES
MIT 4 GURTEN



EINFACHES
ANLEGEN UND
ANZIEHEN



NEUANPASSUNG

STABILISIERUNG

INDIKATIONEN

Zur Stabilisierung bei Knieverletzungen, insbesondere in folgenden Fällen:

- Zerrungen und leichte bis mittelschwere mediale/laterale Instabilitäten.

DIE VORTEILE

- 4 Gurte für 2 Anbringungsoptionen
- Bändering.
- Polyzentrische Knieprothesen
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen.
- Bereich durchbrochene Plica.
- Tricot 3D: Dünn



DAS ANLEGEN
IM VIDEO



UMFANG KNIE &
SCHENKEL
Messen:
• Knieumfang.
• Umfang 15 cm oberhalb
des Knies.



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	Umfang 15 cm oberhalb des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
6904	Blau	1	28 - 33	35 - 45	3322541073136	1098573
		2	33 - 38	40 - 50	3322541073143	1098574
		3	38 - 43	45 - 55	3322541073150	1098575
		4	43 - 48	50 - 60	3322541073167	1098576
		5	48 - 53	55 - 65	3322541073174	1098577

MiGeL: 05.04.13.00.1



GENUGIB® 3D PATELLA-KNIEBANDAGE



EINFACHES
ANLEGEN UND
ANZIEHEN



NEUAUS-
RICHTUNG



ANTIRUTSCH-
SYSTEM



LATEXFREI

KOMPRESSION

INDIKATIONEN

Kniebeschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression helfen kann:

- Tendinopathie der Patellasehne.
- Patellofemorale Arthrose.
- Chondromalazie.
- Knieschmerzen.
- Gefühl/Eindruck der Instabilität.

DIE VORTEILE

- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2.
- Silikon-Patellaring mit Stabilisierungsschiene.
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen.
- Antirutschsystem.
- Öffnung im Bereich der Kniekehle.

* Fähigkeit, die Position Ihres Körpers im Raum zu spüren.



UMFANG KNIE &
SCHENKEL
Messen:
• Knieumfang.
• Umfang 15 cm oberhalb
des Knies.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	Umfang 15 cm oberhalb des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
6678B	Blau	1	28 - 33	35 - 45	3322541075062	1098588
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075079	1098589
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075086	1098590
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075093	1098591
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075109	1098592


MiGeL: 05.04.12.00.1



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne



MIT ÖFFNUNG
IN DER
KNIEKEHLE

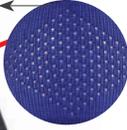

UMFANG KNIE & SCHENKEL
Messen:
• Knieumfang.
• Umfang 15 cm oberhalb
des Knies.

N



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne

GENUGIB® 3D BÄNDER- KNIEBANDAGE



EINFACHES
ANLEGEN UND
ANZIEHEN



NEUANPASSUNG



ANTIRUTSCHSYSTEM



LATEXFREI

KOMPRESSION

INDIKATIONEN

Kniebeschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression helfen kann:

- Leichte Verstauchung
- Gefühl/Eindruck von Instabilität
- Knieschmerzen
- Chondromalazie

DIE VORTEILE

- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2
- Verstärkte Seitenstäbe
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen.
- Antirutschsystem
- Öffnung im Bereich der Kniekehle


* Fähigkeit, die Position Ihres Körpers im Raum zu spüren.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	Umfang 15 cm oberhalb des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
6677B	Blau	1	28 - 33	35 - 45	3322541075017	1098583
		2	33 - 38	40 - 50	3322541075024	1098584
		3	38 - 43	45 - 55	3322541075031	1098585
		4	43 - 48	50 - 60	3322541075048	1098586
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075055	1098587

MiGeL: 05.04.12.00.1



MIT ÖFFNUNG
IN DER
KNIEKEHLE

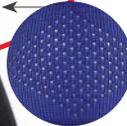

UMFANG KNIE & SCHENKEL
Messen:
• Knieumfang.
• Umfang 15 cm oberhalb
des Knies.

N



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne

GENUGIB® 3D KNIEBANDAGE



EINFACHES
ANLEGEN UND
ANZIEHEN



ANTIRUTSCHSYSTEM



LATEXFREI

PROPRIOZEPTIVE KOMPRESSIN

INDIKATIONEN

Kniebeschwerden, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression helfen kann:

- Verstauchungen und leichte Zerrungen.
- Gefühl/Eindruck der Instabilität.
- Knieschmerzen.

DIE VORTEILE

- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2.
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen.
- Antirutschsystem.
- Öffnung im Bereich der Kniekehle.

* Fähigkeit, die Position Ihres Körpers im Raum zu spüren.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	Umfang 15 cm oberhalb des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
6676B	Blau	1	28 - 33	35 - 45	3322541074966	1098578
		2	33 - 38	40 - 50	3322541074973	1098579
		3	38 - 43	45 - 55	3322541074980	1098580
		4	43 - 48	50 - 60	3322541074997	1098581
		5	48 - 53	55 - 65	3322541075000	1098582

MiGeL: 05.04.10.00.1



QUADRIGIB® 3D



EINFACHES
ANLEGEN UND
ANZIEHEN



ANTIRUTSCHSYSTEM



LATEXFREI

KOMPRESSION

INDIKATIONEN

Beschwerden am Schenkel, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression helfen kann:

- Muskelrisse in der akuten Phase oder während der Rehabilitation.
- Muskelrisse.
- Dehnungen.

DIE VORTEILE

- Kompression* von 15-20 mmHg, vergleichbar Klasse 1.
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Schenkelumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
6681	Blau	1	43 - 51	3322541041845	7229645
		2	51 - 59	3322541041852	7229651
		3	59 - 67	3322541041869	7229668



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne



KNIE SPANGE



DOPPELTE
MITTELPELOTTE



VERSTELLBARER
GURT

LINDERT SCHMERZEN

INDIKATIONEN

- Tendinopathie der Patellasehne.
- Instabilität der Kniescheibe.



UMFANG DES KNIES

Den Umfang des Knies (bei leicht gebeugter Haltung) in der Mitte der Kniescheibe messen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Kniewumfang unterhalb der Kniescheibe in cm	GTIN	PHARMACODE
5004	Schwarz	0 (S)	< 31	3322544855937	7829183
		1 (M)	> 31	3322544685039	7829184

MiGeL: 22.04.10.00.1



KNIEBANDAGE DV4



UFTDURCHLÄSSIG



ZWEI FLEXIBLE BÜGEL



ANTIRUTSCH-SYSTEM

LINDERT SCHMERZEN

INDIKATIONEN

- Arthrose im Femotibialgelenk.

DIE VORTEILE

- Wollstoff.
- 2 weiche Stäbe.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
6618	Anthrazit	1	33 - 37	3322541023698	6131447
		2	38 - 42	3322541023704	6131453
		3	43 - 47	3322541023711	6131476
		4	48 - 52	3322541023728	6131482
		5	52 - 57	3322541023735	6131499

MiGeL: 05.04.12.00.1



KNIEWÄRMER CHALEUR



WEICHE MÉRINO-WOLLE



NATÜRLICHER & ATMUNGSAKTIVER MODAL

HÄLT DIE WÄRME

INDIKATIONEN


Beschwerden, bei denen die adiathermische Eigenschaften der Wolle helfen können, insbesondere in den folgenden Fällen:

- Arthrose.

DIE VORTEILE

- Wolle, die die Körperwärme auf natürliche Weise hält.
- Natürliche Modal®-Faser macht das Gewebe noch weicher und luftdurchlässig.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Knies in cm	GTIN	PHARMACODE
4299	Anthrazit	S	31 - 36	3322541067593	7809782
		M	36 - 41	3322541067609	7809783
		L	41 - 46	3322541067616	7809784
		XL	46 - 51	3322541067623	7809785

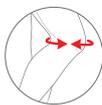

UMFANG DES KNIES
Den Umfang des Knies (bei leicht gebeugter Haltung) in der Mitte der Kniescheibe messen.

L



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne

ENTSCHEIDUNGSBAUM SPRUNGGELENK

— WELCHE SITUATION? —

AKUT - DRINGEND

— WELCHES ZIEL? —

RUHIGSTELLUNG /
BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

STABILISIERUNG / BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

— DIE EMPFEHLUNG VON GIBAUD —



**WALKER
DEFEND AIR**



**SPRUNGGELENK-
ORTHESE
MIT SCHAUMSTOFF**



**SPRUNGGELENK-
ORTHESE
MIT LUFTKISSEN**

— INDIKATIONEN —

- Stabile Frakturen
- Verletzungen von weichem Gewebe
- Post-operativer Einsatz, nach einem Trauma oder bei Neuausrichtung Sprunggelenkverstauchungen 2. und 3. Grades

- Akute leichte bis starke Sprunggelenkverstauchungen
- Entwöhnung nach einer Phase der Ruhigstellung
- Post-chirurgischer Einsatz

CHRONISCH - PRÄVENTIV

PROPRIOZEPTIVE KOMPRESSION
UND EINSCHRÄNKUNG
VON UMKEHRBEWEGUNGEN



MALLEOGIB®
3D STRAP



MALLEOGIB®
3D

Leichte bis mittelschwere
Verstauchungen

Rehabilitationsphase nach einer Verletzung des
Sprunggelenks • Verstauchungen und leichte
Zerrungen • Funktionelle Instabilität



SPRUNGGELENK

MALLÉOGIB® 3D STRAP | S.62

SPRUNGGELENKORTHESEN



SPRUNGGELENKORTHESE MIT LUFTKISSEN

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Einschränkung von Inversion / Eversion des Sprunggelenks Linderung verschaffen kann:

- Leichte bis schwere Verstauchung des Sprunggelenks.
- Entwöhnung nach Gips oder Walker zur Ruhigstellung.
- Rehabilitation nach Verletzungen des Sprunggelenks und / oder postoperativer Einsatz.

VORTEIL

- Mit aufblasbaren Luftkissen anpassbare anatomische Form.

Art.-Nr.	Farbe	Einheitsgrösse*	GTIN	PHARMACODE
6522	Weiss	1	3322544210507	4091666

MiGeL: 22.02.01.00.1

* Schuhgröße von 36 bis 45



SPRUNGGELENKORTHESE MIT SCHAUMSTOFF

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Einschränkung von Inversion / Eversion des Sprunggelenks Linderung verschaffen kann:

- Chronische Instabilität des Sprunggelenks.
- Akute, leichte bis schwere Verstauchung des Sprunggelenks.
- Entwöhnung nach einer Zeit der Ruhigstellung mit Gips oder Walker.
- Rehabilitation nach Verletzungen Sprunggelenks und / oder postoperativer Einsatz.

DIE VORTEILE

- Robuster Schaumstoff.
- Hartschalen beidseitig.

Art.-Nr.	Farbe	Einheitsgrösse*	GTIN	PHARMACODE
6413	Weiss	1	3322547843023	2664767

MiGeL: 22.02.01.00.1

* Schuhgröße von 36 bis 45



SPRUNGGELENKORTHESE JUNIOR

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Einschränkung von Inversion / Eversion des Sprunggelenks Linderung verschaffen kann:

- Akute, leichte bis schwere Verstauchung des Sprunggelenks.
- Chronische Instabilität des Sprunggelenks.
- Entwöhnung nach einer Zeit der Ruhigstellung mit Gips oder Walker.
- Rehabilitation nach Verletzungen Sprunggelenks und / oder postoperativer Einsatz.

DIE VORTEILE

- Feste, anatomisch geformte Schalen, links und rechts einsetzbar.
- Elastischer Schaumstoff.
- An die kindliche Morphologie angepasster Hebelarm.

Art.-Nr.	Farbe	Schuhgrösse (< 35)	GTIN	PHARMACODE
6597	Schwarz	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

MiGeL: 22.02.01.00.1

SPRUNGGELENKBANDAGEN



KNÖCHELUMFANG
Den Umfang oberhalb
des Knöchels messen.



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne

PATENTIERT



PATENTIERTES
ANTIVARUS-
GURTSYSTEM



EINFACHES ANLEGEN
UND ANZIEHEN



STRAP
ENTHÄLT
LATEX

MALLEOGIB® 3D STRAP

EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION

INDIKATIONEN

Beschwerden des Sprunggelenks, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression und eine Einschränkung der Inversionsbewegung helfen kann:

- Leichte bis mittelschwere Verstauchung (ohne Ödem).
- Rehabilitationsphase nach einer Verletzung des Sprunggelenks.
- Funktionelle Instabilität.

DIE VORTEILE

- Patentiertes beidseitiges Anti-Varus-Gurtsystem.
- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2.
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen.
- Spezifische Dekompressionszone mit Lochstruktur auf dem Rist.

* Fähigkeit, die Position des
eigenen Körpers im Raum
zu spüren.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Sprunggelenkumfang oberhalb des Knöchels in cm	GTIN	PHARMACODE
6680	Blau	1	18 - 20	3322541041791	7229585
		2	20,5 - 23	3322541041807	7229591
		3	23,5 - 26	3322541041814	7229616
		4	26,5 - 29	3322541041821	7229622
		5	29,5 - 32	3322541041838	7229639

MiGeL: 05.02.14.00.1



KNÖCHELUMFANG
Den Umfang oberhalb
des Knöchels messen.



Hergestellt in Frankreich
in unserem Werk in St-Etienne



UFTDURCHLÄSSIG



EINFACHES
ANLEGEN LATEXFREI
UND ANZIEHEN



LATEXFREI

MALLEOGIB® 3D

KOMPRESSION

INDIKATIONEN

Beschwerden des Sprunggelenks, bei denen insbesondere in den folgenden Fällen eine Kompression helfen kann:

- Rehabilitationsphase nach einer Verletzung des Sprunggelenks.
- Verstauchungen und leichte Zerrungen.
- Leichte Instabilität.

DIE VORTEILE

- Propriozeptive Kompression* von 20-36 mmHg, vergleichbar Klasse 2.
- Feine Nähte und eine Druckentlastungszone erleichtern das An- und Ausziehen.
- Spezifische Dekompressionszone mit Lochstruktur auf dem Rist.

* Fähigkeit, die Position des
eigenen Körpers im Raum
zu spüren.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Sprunggelenkumfang oberhalb des Knöchels in cm	GTIN	PHARMACODE
6679	Blau	1	18 - 20	3322541041746	7229527
		2	20,5 - 23	3322541041753	7229533
		3	23,5 - 26	3322541041760	7229556
		4	26,5 - 29	3322541041777	7229562
		5	29,5 - 32	3322541041784	7229579

MiGeL: 05.02.11.00.1

DIE GEMEINSAMEN VORZÜGE

- Dickes Schaumstoffpolster in Innensohle, Knöcheln und Ferse für mehr Tragekomfort.
- Stossdämpfende Sohle für geringere Belastung beim Gehen.
- Abgerundete Sohle für ein stabiles, natürliches Abrollen des Fußes.



WALKER DEFEND AIR

RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

- Sprunggelenkverstauchungen 2. und 3. Grades.
- Nach chirurgischen Eingriffen an den Bändern, weichem Gewebe und Sehnen.
- Stabile Fraktur der Fibula, des Talus, des Calaneus und des Malleolus Medialis.

Art.-Nr.	Farbe	Taille	Pointure	Haut.	GTIN	PHARMACODE
6757	Blau	2	36 - 40	h 24 cm	4719894925233	1104833
		3	40 - 43	h 25 cm	4719894925240	1104834
		4	43 - 46	h 28 cm	4719894925257	1104835
		5	46 - 49	h 30 cm	4719894925264	1104836

MiGeL: 22.03.03.00.1



WALKER DEFEND AIR SHORT

RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

- Sprunggelenkverstauchungen 2. und 3. Grades.
- Nach chirurgischen Eingriffen an den Bändern, weichem Gewebe und Sehnen.
- Stabile Fraktur der Fibula, des Talus, des Calaneus und des Malleolus Medialis.

Art.-Nr.	Farbe	Taille	Pointure	Haut.	GTIN	PHARMACODE
6758	Blau	2	36 - 40	h 24 cm	4719894925196	1104837
		3	40 - 43	h 25 cm	4719894925202	1104838
		4	43 - 46	h 28 cm	4719894925219	1104839
		5	46 - 49	h 30 cm	4719894925226	1104840

MiGeL: 22.03.03.00.1

POST-OP ENTLASTUNGSSCHUHEN

KURZER VORDERFUSS

BEIDSEITIG UNISEX-MODELL



INDIKATIONEN

Zur Druckentlastung des Vorderfusses bei Fussverletzungen in folgenden Fällen:


- Nach einem chirurgischen Eingriff am Vorderfuss
- Plantarfibromatose am Vorderfuss
- Entzündung im Vorderfuss, Ödem
- Frakturen oder Verletzungen des Vorderfusses

DIE VORTEILE

- Gepolsterter, atmungsaktiver Stoffeinsatz
- Verschlussystem mit Doppelschnallen
- Wenig Reibeflächen
- Passend für rechten oder linken Fuss

Art-Nr.	Grösse	Schuhgrösse	GTIN	PHARMACODE
8269	1	35 - 38	3322541043979	1098910
	2	39 - 42	3322541043986	1098911
	3	43 - 46	3322541043993	1098912

MiGeL: 26.01.04.02.1

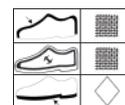

LANGER VORDERFUSS

BEIDSEITIG UNISEX-MODELL



INDIKATIONEN

Zur Druckentlastung des Vorderfusses bei Fussverletzungen in folgenden Fällen:


- Nach einem chirurgischen Eingriff am Vorderfuss
- Plantarfibromatose am Vorderfuss
- Entzündung im Vorderfuss, Ödem
- Frakturen oder Verletzungen des Vorderfusses
- Algodystrophie Gichtanfall

DIE VORTEILE

- Gepolsterter, atmungsaktiver Stoffeinsatz
- Klettverschluss
- Wenig Reibeflächen
- Passend für rechten oder linken Fuss

Art-Nr.	Grösse	Schuhgrösse	GTIN	PHARMACODE
8270	1	35 - 36	3322541044006	1098913
	2	37 - 38	3322541044013	1098914
	3	39 - 40	3322541044020	1098915
	4	41 - 42	3322541044037	1098916
	5	43 - 44	3322541044044	1098917
	6	45 - 46	3322541044051	1098918
	7	47 - 48	3322541044068	1098919

MiGeL: 26.01.04.02.1

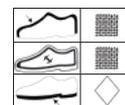

FERSE

BEIDSEITIG UNISEX-MODELL



INDIKATIONEN

Zur Druckentlastung des Hinterfusses bei Fussverletzungen vor allem in folgenden Fällen:


- Fraktur oder Verletzung des Sprunggelenks
- Verletzungen oder Geschwüre in der Ferse
- Bursitis der Achillessehne

DIE VORTEILE

- Gepolsterter, atmungsaktiver Stoffeinsatz
- Verschlussystem mit Doppelschnallen
- Wenig Reibeflächen
- Passend für rechten oder linken Fuss

Art-Nr.	Grösse	Schuhgrösse	GTIN	PHARMACODE
8271	1	35 - 36 - 37	3322541044075	1098920
	2	38 - 39 - 40	3322541044082	1098921
	3	41 - 42 - 43	3322541044099	1098922
	4	44 - 45 - 46	3322541044105	1098923

MiGeL: 26.01.04.02.1

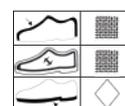

HALLUX VALGUS



HALLUX VALGUS KORREKTURBANDAGE



NEUAUSRICHTUNG
GROSSZEHE



ZUM ANLEGEN
NACHTS

NEUAUSRICHTUNG GROSSZEHE

INDIKATIONEN

Zur NEUAUSRICHTUNG des grossen Zehs bei Fussverletzungen, insbesondere in folgenden Fällen:

- Zurückbildbarer Hallux Valgus

DIE VORTEILE

- Schont die Haut dank nachgiebigem, weichem Textilstoff
- Ergonomisch gestaltet für intuitives, einfaches Anlegen
- Unauffällig durch dünnes Material und die Farbe Nude
- Tragekomfort und anpassbar mit Hallux-Schutzkissen, einem nachgiebigen Haltesystem und einem grossen Verstellbereich.

TRAGEANWEISUNG

- Die HV-Korrekturbandage wird nachts verwendet. Sie kann in Ruheperioden auch tagsüber getragen werden

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	GTIN	PHARMACODE
6800	Nude	R	3322541065650	1098908
		L	3322541065667	1098909

MiGeL: 22.01.01.00.1

FERSENEINLAGEN



INTUITIVES ANLEGEN

FERSENERHÖHUNG



INDIKATIONEN

Zur Fersenerhöhung bei Fussverletzungen, insbesondere in folgenden Fällen:

- Tendinopathie der Achillessehne
- Fersenschmerzen
- Fersensport

VORTEILE

- Stützbereich zum besseren Aufsetzen der Ferse placement du talon.

Ref.	Farbe	Höhe	Grösse	Schuhgrösse	EAN	PHARMACODE
6369	Blau	8 mm	1	34 - 38	3322547076087	5921420
		8,5 mm	2	39 - 42	3322547076094	5921437
		8,5 mm	3	43 - 48	3322547076100	5921443

Entwickelt und
hergestellt in
Frankreich

JUNIOR

CERVICALSTÜTZEN C1 | S. 66



CERVICALSTÜTZEN C1 WEICH MIT SCHUTZÜBERZUG

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

Leichte Beschwerden am Hals oder Pathologien, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule Linderung verschaffen kann:

- Extensionstrauma des Halses (Verstauchung der Halswirbelsäule).
- Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule

DIE VORTEILE

- Schränkt den Bewegungsradius der Halswirbelsäule ein.
- Abnehmbarer Schutzbezug.

Höhe	Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang am Halsansatz in cm und Wahl der Höhe	GTIN	PHARMACODE
6 cm	6625	Grau	0 JUNIOR	28 - 31	3322541024152	6270887

MiGeL: 22.12.01.00.1



ARM-SCHULTER-BANDAGE

RUHIGSTELLUNG


INDIKATIONEN

Beschwerden mit der Schulter, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks mit dem seitlich am Körper anliegenden Ellbogen insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Instabilitäten/Verletzungen der Schulter.
- Vor oder nach einem operativen Eingriff.
- Abheilen/Überdehnung von weichem Gewebe.

VORTEIL

- Leichtes Gewebe.

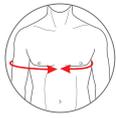

F
UMFANG VON THORAX + OBERARM
Den Umfang des Thorax unter der Brust + Oberarm (nur ein Arm) messen.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Grösse* Umfang des Thorax unterhalb der Brust + Oberarm in cm	GTIN	PHARMACODE
4209	Schwarz	0 JUNIOR	< 45	3322541008060	4791406
		1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077	4791398

MiGeL: 22.09.01.00.1



ARMSCHLINGE MIT TASCHE

LINDERT SCHMERZEN

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen eine Unterstützung des Arms insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Nach einer Verletzung sowie vor oder nach einem chirurgischen Eingriff.
- Unterstützung eines Gipsverbands oder einer Schiene.

DIE VORTEILE

- Verstellung durch Schiebeschnalle.
- Stützt den Arm.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
6507	Schwarz	00 JUNIOR	< 45	3322541008411	5922477
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030	5922454

MiGeL: 05.10.03.00.1



RÜCKEN-GERADEHALTER

KORRIGIERT DIE HALTUNG & LINDERT RÜCKENSCHMERZEN

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen eine Korrektur der Haltung insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Haltungsschwächen.
- Rückenschmerzen.



DIE VORTEILE

- Leichtes Anlegen durch Schlaufensystem.
- Verbessert die Körperhaltung und die posturale Kontrolle.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Thorax in cm	GTIN	PHARMACODE
6611	Schwarz	0 JUNIOR	40 - 60	3322541022820	6041508
		1 JUNIOR	60 - 80	3322541022837	6041514

MiGeL: 22.09.05.00.1



SCHLÜSSELBEINBANDAGE

HALT

INDIKATIONEN

Beschwerden am Brustkorb, bei denen eine repulsive Schulterhaltung insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Frakturen und Luxationen des Schlüsselbeins.
- Probleme mit der Körperhaltung.

DIE VORTEILE

- Einfaches Anlegen: Verstellung durch Schiebeschnalle.
- Fördert die korrekte Haltung.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Brustumfang in cm	GTIN	PHARMACODE
4222	Schwarz	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995	4791607
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008	4791599

MiGeL: 22.09.05.00.1



MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK



BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung des Handgelenks Linderung verschaffen kann:
- Leichte bis mittelschwere Verstauchungen und Zerrungen.
 - Bursitis.
 - Entwöhnung nach Gipsverband.
 - Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

DIE VORTEILE

- Breite, anpassbare Handflächenschiene
- 3 Zuggurte.
- Vollständige Bewegungsfreiheit der Finger.



Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6508	Schwarz	OD JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
		OG JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311

MiGeL: 22.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK LANG



BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung des Handgelenks Linderung verschaffen kann:
- Leichte bis schwere Verstauchungen und Zerrungen.
 - Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips.
 - Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen.
- 4 Zuggurte.
- Anatomisch geformte palmare Schiene.
- Breite, gepolsterte, flexible Schiene.



Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6649	Blau	OD JUNIOR	10-14	3322541028976	6623966
		OG JUNIOR	10-14	3322541028983	6623972

MiGeL: 22.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA HANDGELENK DAUMEN



RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

- Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Bewegungseinschränkung des Handgelenks und des Daumens Linderung verschaffen kann:
- Trauma im Bereich Handgelenk / Daumen.
 - Entwöhnung nach Ruhigstellung durch Gips.
 - Postoperative Verwendung.
 - Skifahrer-Daumen.
 - Andere Verletzungen von weichem Gewebe.

DIE VORTEILE

- Komfortpelotte polstert den Hohlhandbogen.
- Schränkt die Bewegungen von Handgelenk und Daumen ein.
- 4 Zuggurte.
- Abnehmbare, flexible Schienen.



Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang des Handgelenks in cm	GTIN	PHARMACODE
6650	Blau	OD JUNIOR	10-14	3322541029034	6623883
		OG JUNIOR	10-14	3322541029041	6623908

MiGeL: 22.07.03.00.1

KNIESCHIENE 0° UNIVERSAL 3-TEILIG



RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen eine Ruhigstellung des Knies insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:

- Knieverletzungen.
- Ruhigstellung im Notfall.
- Prä-/postoperative Ruhigstellung des Knies.

DIE VORTEILE

- Gurt zur Vorpositionierung
- 3-teilige Schiene, in der Breite verstellbar.
- 4 halbrunde Zuggurte.
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade in cm	GTIN	PHARMACODE
6910	schwarz	0 JUNIOR	30 (Kinder)	3322541070531	7826024

MiGeL : 22.04.03.00.1



LÄNGE SCHENKEL / WADE
Die Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade messen.

KNIESCHIENE 0°/20° STANDARD 1-TEILIG



RUHIGSTELLUNG

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen eine Ruhigstellung des Knies insbesondere in den folgenden Fällen helfen kann:


- Knieverletzungen.
- Ruhigstellung im Notfall.
- Prä-/postoperative Ruhigstellung des Knies.

DIE VORTEILE

- Gurt zur Vorpositionierung
- 4 halbrunde Zuggurte.
- Piktogramme auf den Gurten zeigen die Reihenfolge des Anziehens an.
- Abnehmbare Seitenstreben für 0° oder 20° Flexion.

Art.-Nr.	Farbe	Grösse	Umfang 20 cm oberhalb der Kniescheibe (Patella) in cm	Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade in cm	GTIN	PHARMACODE
6911	schwarz	0 JUNIOR	30-40	30	3322541070586	7826029

MiGeL : 22.04.03.00.1

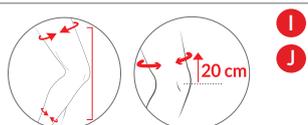

LÄNGE SCHENKEL / WADE
Die Länge vom oberen Drittel des Oberschenkels bis zum unteren Drittel der Wade messen.

SPRUNGGELENKORTHESE JUNIOR



EINSCHRÄNKUNG VON INVERSION / EVERSION

INDIKATIONEN

Beschwerden, bei denen insbesondere in folgenden Fällen eine Einschränkung von Inversion / Eversion des Sprunggelenks Linderung verschaffen kann:

- Akute, leichte bis schwere Verstauchung des Sprunggelenks.
- Chronische Instabilität des Sprunggelenks.
- Entwöhnung nach einer Zeit der Ruhigstellung mit Gips oder Walker.
- Rehabilitation nach Verletzungen Sprunggelenks und / oder postoperativer Einsatz.

DIE VORTEILE

- Feste, anatomisch geformte Schalen, links und rechts einsetzbar.
- Elastischer Schaumstoff.
- An die kindliche Morphologie angepasster Hebelarm.

Art.-Nr.	Farbe	Schuhgrösse (< 35)	GTIN	PHARMACODE
6597	Schwarz	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

MiGeL: 22.02.01.00.1

KONTAKT

KUNDENDIENST

Montag bis Freitag von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr

Tel. 022 328 06 00 • Fax 022 328 02 74 • gibaudsuisse@gibaud.com

GIBAUD (SUISSE) SA – Rue Gourgass 23 – 1205 Genf

DIREKT-LIEFERSERVICE

Alle vor 15.00 Uhr eingegangenen Bestellungen werden noch am gleichen Tag mit Postpac Priority versendet.

Wir empfehlen dringend, die Pharmacodes zu verwenden.

Kein Verkauf an Privatpersonen

WARENRÜCKSENDUNG

An diese Adresse können nur Waren zurückgesandt werden, die von GIBAUD (Suisse) SA, Rue Gourgass 23, 1205 Genf, in Rechnung gestellt wurden. Im Falle einer Rücksendung, die der Firma Gibaud zuzuschreiben ist: Umtausch oder Gutschrift in Höhe von 100 % des Kaufwerts. Im Falle einer Rücksendung, die dem Kunden zuzuschreiben ist:

Nach Zustimmung des Unternehmens oder des Aussendienstmitarbeiters und unter der Voraussetzung, dass das Produkt und die Verpackung in einwandfreiem Zustand sind, erfolgt der Umtausch unter folgenden Bedingungen:

Produkte, die weniger als 5 Jahre alt sind und noch im Katalog geführt werden: -20 % Wiedereinlagerungsgebühr.

Wahlbestellung (maximal 2 Artikel): Rückgabe eines Artikels innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Produkte, Gutschrift von 100 % des Kaufwerts. Wenn beide Artikel zurückgegeben werden oder die Frist überschritten wird: -20 % Wiedereinlagerungsgebühr.

Produkte «auf Anfrage» sind von einer Rücknahme ausgeschlossen, sofern es sich nicht um Herstellungsfehler handelt.

ALLE unsere Produkte sind bei Ihrem GROSSISTEN erhältlich

www.gibaud.ch

FOLGEN SIE UNS:



GIBAUD

Ein
Unternehmen
der Innothera-
Gruppe



SWISS MEDTECH

KUNDENNUMMER



Gesamtkatalog SCHWEIZ 2024-2025

Ref. CATSUA



7352110

Bevor Sie eines unserer Produkte erstmals verwenden, lesen Sie bitte immer aufmerksam alle Informationen auf der Packung und in den Anleitungen. Es handelt sich um Medizinprodukte der Klasse 1. Diese Medizinprodukte sind reglementierte Gesundheitsartikel, die im Rahmen dieser Regelungen die Markierung CE tragen. Zulassungsdatum: Februar 2024.

Druckfehler oder Preisänderungen vorbehalten. Gibaud behält sich das Recht vor, die Produkte seines Gesamtkatalogs ohne Vorankündigung zu ändern. Abbildungen sind nicht vertraglich bindend.